



Plasma-SeqSensei™

IVD Software

Istruzioni per l'uso

Aprile 2024

Versione documento PSSSWIFU.R4
Versione software 1.3.1 e successive

it

Sommaro

1	Finalità	2
2	Introduzione	3
2.1	Concetto del prodotto	3
2.2	Specifiche di sistema per l'esecuzione del software	3
2.3	Marchi commerciali	4
2.4	Licenze	4
2.4.1	Licenza per l'utente finale	4
2.4.2	Licenza COSMIC (Qiagen)	4
2.4.3	GNU	4
2.5	Protezione dei dati personali	4
3	Avvisi e precauzioni	5
3.1	Operatori	5
3.2	Qualità del prodotto Plasma-SeqSensei™ IVD Software	5
3.2.1	Manutenzione di Plasma-SeqSensei™ IVD Software	6
3.2.2	Sistema operativo Microsoft	7
3.2.3	Limitazioni del sistema	7
3.2.4	Limitazioni di responsabilità	8
3.3	Virus informatici	8
3.4	Ambiente operativo	8
4	Specifiche del dispositivo di sequenziamento	9
4.1	Acquisizione dei dati	9
5	Fasi iniziali e layout della finestra del programma	11
5.1	Fasi iniziali	11
5.1.1	Scaricare e installare il software	11
5.1.2	Acquisire una chiave di licenza	12
5.1.3	Avviare il programma	12
5.1.4	Chiudere il programma	12
5.2	Panoramica delle icone e delle funzioni	12
5.3	Panoramica dell'interfaccia utente	15
5.3.1	Modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa)	15
5.3.2	Modulo "Data Analysis" (Analisi dei dati)	18
5.3.3	Modulo "Reporting" (Refertazione)	19
6	Moduli di Plasma-SeqSensei™ IVD Software	20
6.1	Modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa)	20
6.2	Modulo "Data Analysis" (Analisi dei dati)	29
6.3	Modulo "Reporting" (Refertazione)	33
7	Referti	37
8	Ricerca ed eliminazione dei guasti	48
9	Glossario e terminologia	52
10	Cronologia delle revisioni	53
11	Appendice A	55

1 Finalità

Plasma-SeqSensei™ IVD Software è destinato all'analisi dei risultati di sequenziamento ottenuti con Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific IVD Kit di Sysmex Inostics (dati di sequenziamento in parallelo (Next-Generation Sequencing, NGS)) per il controllo della validità e per rilevare e segnalare mutazioni nelle regioni target dell'analisi.

Il software può rilevare sostituzioni di varianti a singolo nucleotide (Single-Nucleotide Variant, SNV), alterazioni di delezione o inserzione, e mutazioni di delezione-inserzione (delins) come specificato nella rispettiva analisi Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific IVD.

Il software deve essere utilizzato con uno specifico Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific IVD Kit per supportare il medico nella determinazione del potenziale beneficio della terapia per i pazienti oncologici. Le informazioni generate dal software non dovrebbero mai essere l'unico fattore determinante per l'assunzione di decisioni mediche. Esse devono essere valutate insieme agli altri risultati clinici e alla storia del paziente.

Il software deve essere utilizzato da personale addestrato all'interno di un laboratorio specializzato.

Importante: *Il software può essere utilizzato solo insieme e in conformità alle IFU di Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific IVD Kit di Sysmex Inostics e non con altri tipi di prodotti o analisi sviluppate in laboratorio.*

2 Introduzione

Le presenti istruzioni per l'uso (IFU) descrivono come utilizzare Plasma-SeqSensei™ IVD Software per l'analisi dei Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific IVD Kit di Sysmex Inostics.

La preghiamo di leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il software. Conservare il manuale in un luogo sicuro e accessibile per future consultazioni.

Nonostante le numerose precauzioni adottate per garantire la qualità del contenuto di questo manuale, nel caso in cui si dovessero riscontrare errori od omissioni, contattare il centro di assistenza tecnica del rappresentante Sysmex autorizzato di zona.

Sono vietate la modifica, la traduzione, l'ingegneria inversa, la decompilazione e il disassemblaggio di questo manuale e del software. È vietata la creazione di lavori derivativi basati su questo manuale o sul software. È vietata la copia di questo manuale o del software per scopi diversi dal backup in conformità con l'accordo di licenza.

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Sysmex autorizzato di zona.

2.1 Concetto del prodotto

Plasma-SeqSensei™ IVD Software consente all'utente di pianificare e analizzare le corse di sequenziamento di Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific IVD Kit e di generare referti per i campioni analizzati.

2.2 Specifiche di sistema per l'esecuzione del software

Sistema operativo:	Windows® 10 (64 bit)
CPU:	una CPU recente (Intel® Core™ i5/7 o AMD Ryzen™)
RAM:	16 GB
Archiviazione:	10 GB di spazio libero su disco
Risoluzione dello schermo:	≥ 1.440 x 810 pixel

2.3 Marchi commerciali

- I nomi aziendali e dei prodotti in queste IFU sono marchi registrati o marchi commerciali dei rispettivi proprietari.
- La mancata indicazione esplicita di un marchio commerciale in queste IFU non implica l'autorizzazione all'uso.
- TM e [®] non sono indicati esplicitamente in queste IFU.

2.4 Licenze

2.4.1 Licenza per l'utente finale

L'utente di Plasma-SeqSensei™ IVD Software deve accettare l'accordo di licenza con Sysmex Inostics GmbH prima dell'installazione del software. Per il testo integrale dei *Termini e condizioni generali per le licenze software di Sysmex Inostics GmbH*, fare riferimento a ► 11 Appendice A, pagina 55/61.

2.4.2 Licenza COSMIC (Qiagen)

L'utilizzo di Dynamic Software Tool Large Enterprise di COSMIC all'interno di Plasma-SeqSensei™ IVD Software è coperto da un accordo di licenza con Qiagen K. K.

2.4.3 GNU

La GNU General Public License (www.gnu.org/licenses) si applica ad alcune parti di questo software. Se si desidera ottenere il codice sorgente o informazioni dettagliate per la parte del software soggetta alla GNU General Public License, contattare la filiale locale o l'ufficio vendite. Per la parte del software che non è soggetta alla GNU General Public License, sono vietati l'accesso, la decodifica, la decompilazione e il disassemblaggio del software.

2.5 Protezione dei dati personali

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, l'utente deve attenersi alle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati.

3 Avvisi e precauzioni

Le informazioni generate con l'utilizzo di questo prodotto non dovrebbero mai essere l'unico fattore determinante per l'assunzione di decisioni mediche. Esse devono essere valutate insieme agli altri risultati clinici e alla storia del paziente.

Importante: *Il software può essere utilizzato solo insieme e in conformità alle IFU di Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific IVD Kit di Sysmex Inostics e non con altri tipi di prodotti o analisi sviluppate in laboratorio.*

Qualsiasi altro uso diverso dalla finalità specificata è considerata non coerente con l'etichetta.

Sysmex declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite risultanti dall'uso non coerente con l'etichetta.

3.1 Operatori

Plasma-SeqSensei™ IVD Software deve essere utilizzato solo da personale addestrato all'interno di un laboratorio specializzato.

In caso di malfunzionamento, consultare le IFU. Per ulteriore assistenza, contattare il rappresentante Sysmex autorizzato di zona.

3.2 Qualità del prodotto Plasma-SeqSensei™ IVD Software

Per garantire le prestazioni ottimali di Plasma-SeqSensei™ IVD Software, è richiesta la manutenzione regolare di Plasma-SeqSensei™ IVD Software e del sistema operativo Microsoft Windows®. I capitoli seguenti illustrano le attività richieste.

Nota bene: *Per quanto riguarda il processo di installazione e aggiornamento di Plasma-SeqSensei™ IVD Software, sono richiesti i diritti dell'amministratore locale sul dispositivo.*

Importante: *È fondamentale avere a disposizione una connessione a Internet attiva per ricevere notifiche di aggiornamenti all'interno del software.*

3.2.1 Manutenzione di Plasma-SeqSensei™ IVD Software

Il servizio di aggiornamento del Plasma-SeqSensei™ IVD Software verifica all'avvio del software la disponibilità di una connessione Internet attiva e la connessione al server per gli aggiornamenti. Qualora non sia possibile connettersi, comparirà un pulsante con una croce rossa in basso a destra della schermata dell'applicazione. Cliccando su tale pulsante viene inviata una richiesta per verificare la connessione Internet e le impostazioni del firewall per garantire una corretta esecuzione del servizio di aggiornamento del software.




Quando il servizio di aggiornamento si connette in modo corretto, il Plasma-SeqSensei™ IVD Software notificherà all'utente la disponibilità per il download di nuovi aggiornamenti al Plasma-SeqSensei™ IVD Software. Se è necessario installare una nuova versione del Plasma-SeqSensei™ IVD Software, è possibile avviare il processo all'avvio del software oppure utilizzare il pulsante [Update available] (Aggiornamento disponibile) nella schermata dell'applicazione nel momento più comodo per l'utente. Questo passaggio richiede i diritti di amministratore.



Nel caso di un aggiornamento dei saggi Plasma-SeqSensei™ IVD esistenti, per avviare il processo di aggiornamento, comparirà solo il pulsante [Update available] (Aggiornamento disponibile) sulla schermata dell'applicazione. Utilizzare sempre la versione più recente del Plasma-SeqSensei™ IVD Software e del saggio, se possibile. Dopo aver installato la versione software più recente, non sarà più possibile ripristinare una versione precedente.

Quando si rendono disponibili nuovi saggi Plasma-SeqSensei™ IVD, il software notificherà l'utente mostrando un pulsante [New assay available] (Nuovo saggio disponibile) sulla schermata dell'applicazione.

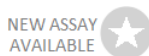

Una nota di rilascio con i dettagli sulla nuova versione del Plasma-SeqSensei™ IVD Software sarà disponibile per il download all'indirizzo <https://sysmex-inostics.com/products/kit-specs/> oppure usando il pulsante

per il manuale dell'utente nella parte inferiore della schermata dell'applicazione.



3.2.2 Sistema operativo Microsoft

L'installazione, gli aggiornamenti e la sicurezza del sistema operativo Microsoft sono responsabilità dell'utente. Si raccomanda di aggiornare frequentemente il sistema. Tenere presente che un riavvio automatico del sistema operativo Windows® causato dall'installazione degli aggiornamenti potrebbe interrompere un'analisi dei dati di Plasma-SeqSensei™ in corso. Si raccomanda di disabilitare i riavvii automatici o di configurare adeguatamente l'orario di attività del sistema nelle impostazioni di Windows® Update.

3.2.3 Limitazioni del sistema

Tipi di file di input	.fastq.gz
Dispositivi di sequenziamento da utilizzare	Illumina NextSeq500/550
Numero minimo di campioni da testare per corsa	2
Numero massimo di campioni da testare per corsa	16 (kit standard) o 32 (con kit di estensione)
Numero massimo di piastre da testare per corsa	1 (kit standard) o 2 (con kit di estensione)
Numero di controlli da testare per piastra per corsa	2 (Positive Control [PC] e No Template Control [NTC])
Numero di analisi da aggregare per corsa di sequenziamento	Nessuno Nota bene: Questo test è di tipo singolo; non è possibile aggregare altre analisi contemporaneamente sul dispositivo di sequenziamento.

3.2.4 Limitazioni di responsabilità

Sysmex declina ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti di Plasma-SeqSensei™ IVD Software derivanti dai seguenti fattori:

- mancato rispetto delle procedure di manutenzione precedentemente indicate;
- utilizzo del sistema al di fuori delle limitazioni del sistema.

3.3 Virus informatici

I prodotti scaricabili dal sito web <https://sysmex-inostics.com/> sono stati verificati e sono privi di virus informatici.

3.4 Ambiente operativo

Per garantire prestazioni ottimali, Plasma-SeqSensei™ IVD Software deve essere installato sullo stesso computer dove sono conservati i dati di sequenziamento. In caso di connessione tramite una rete, a seconda della velocità di scaricamento/caricamento della connessione alla rete, i tempi di analisi possono aumentare oppure l'analisi può bloccarsi completamente.

La gestione della rete è interamente sotto la responsabilità dell'organizzazione dell'operatore, che deve offrire una sicurezza della rete adeguata a garantire la sicurezza dei dispositivi connessi. Le caratteristiche di sicurezza raccomandate includono, tra le altre, l'autorizzazione di accesso alla rete, limitazioni di accesso a Internet e l'implementazione di tecnologie hardware/software per impedire l'ingresso di virus/malware.

4 Specifiche del dispositivo di sequenziamento

Plasma-SeqSensei™ Software è sviluppato per l'analisi dei dati grezzi di sequenziamento (nella forma di file .fastq.gz) ottenuti con l'uso di vari dispositivi di sequenziamento Illumina. Solo i dispositivi Illumina NextSeq™500 e Illumina NextSeq™550 possono essere utilizzati in congiunzione con Plasma-SeqSensei™ IVD Software.

Il seguente software di controllo è stato utilizzato durante lo sviluppo del Plasma-SeqSensei™ IVD Kit. Se si utilizza una versione successiva del software di controllo, verificarne la funzionalità prima di avviare la corsa di sequenziamento. Inoltre, verificare la funzionalità della scheda campione generata da Plasma-SeqSensei™ IVD Software in combinazione con la versione successiva del software di controllo di Illumina.

Nome del software	Produttore/Fornitore
NextSeq™ Control Software v4.0.1.41	Illumina, Inc.
NextSeq™ Local Run Manager Software v2.4.0	Illumina, Inc.

4.1 Acquisizione dei dati

A seconda della configurazione del sistema di elaborazione a valle, è possibile seguire diversi percorsi per l'acquisizione dei dati. Tutti questi percorsi sono basati sulla configurazione della scheda campione eseguita nella fase di pianificazione della corsa di sequenziamento.

Il dispositivo di sequenziamento NextSeq™ può essere utilizzato seguendo due percorsi diversi.

1. Il percorso raccomandato è quello del Local Run Manager (LRM) del dispositivo NextSeq™. L'LRM può essere utilizzato per generare file FASTQ direttamente tramite il sequenziatore, selezionando "GenerateFASTQ Module" (Modulo GenerateFASTQ) nelle impostazioni. Il software esegue la demultiplazione e la rifilatura dell'adattatore utilizzando la scheda campione e le impostazioni dell'adattatore fornite. I file FASTQ risultanti (.fastq.gz) devono essere resi disponibili al computer che esegue Plasma-SeqSensei™ IVD Software.

Importante: *Quando si utilizza l'LRM, l'"Adapter" (Adattatore) e la sua sequenza (indicati nella scheda campione, vedere la scheda campione di esempio nel, ► capitolo 6.1 Modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa), passaggio 7.c, pagina 20/61) devono essere aggiunti in "Advanced Module Settings" (Impostazioni avanzate modulo) per consentire il corretto trimming dell'adattatore.*

2. Durante la configurazione manuale, il dispositivo NextSeq™ scrive le informazioni di sequenziamento in una cartella della corsa in formato "binary base call" (file .bcl) e non esegue né la demultiplazione, né la rifilatura dell'adattatore. La demultiplazione ed il trimming dell'adattatore devono essere eseguiti manualmente dal cliente dopo il sequenziamento, utilizzando il software bcl2fastq fornito da Illumina insieme ad una scheda campione compatibile con bcl2fastq, che può essere generata durante la pianificazione della corsa. I file FASTQ risultanti (.fastq.gz) devono essere resi disponibili alla macchina di analisi che esegue Plasma-SeqSensei™ IVD Software.

5 Fasi iniziali e layout della finestra del programma

5.1 Fasi iniziali

- La scala dello schermo del computer deve essere impostata a un valore pari al 100 % (se la risoluzione dello schermo è 1.440 x 810 pixel). Se la risoluzione o la scala dello schermo non rientra nell'intervallo accettato comparirà un messaggio di avviso. Il software effettuerà un indirizzamento automatico alle impostazioni del display ove necessario.
- Scaricare il programma dal seguente sito web: <https://sysmex-inostics.com/products/kit-specs/>.
- Prima di installare il programma, ottenere una chiave di licenza da Sysmex Inostics GmbH.
- Sono richiesti i diritti di amministratore sul dispositivo.

5.1.1 Scaricare e installare il software

Plasma-SeqSensei™ IVD Software può essere scaricato all'indirizzo <https://sysmex-inostics.com/products/kit-specs/> come file compresso .zip.

Scaricare il file nella cartella Download di Windows® 10, fare clic con il tasto destro del mouse su di esso e selezionare "Extract all..." (Estrai tutto...). Nella finestra che si apre, selezionare "Extract" (Estrai). La cartella con i file estratti viene aperta automaticamente. Per avviare il processo di installazione, fare doppio clic sul file "Plasma-SeqSensei™ IVD Software" (non estrarre i file zip di analisi presenti in questa cartella). Seguire le istruzioni di installazione visualizzate sullo schermo. Accettare l'accordo di licenza e, quando richiesto, inserire la chiave di licenza.

Durante la procedura di installazione, sono richiesti i diritti dell'amministratore per completare l'installazione del software.

Il software deve essere installato localmente sul hard drive del dispositivo. Non eseguire il file .msi (Windows® installer file) su un drive di rete.

5.1.2 Acquisire una chiave di licenza



Quando si acquista Plasma-SeqSensei™ IVD Kit, Sysmex Inostics GmbH fornisce una chiave di licenza per cliente.

5.1.3 Avviare il programma




Fare doppio clic sull'icona di Plasma-SeqSensei™ IVD sul desktop:








5.1.4 Chiudere il programma

1. Chiudere il programma facendo clic sulla "X" () nell'angolo in alto a destra della finestra del software oppure sulla "X" nel cerchio grigio () nell'angolo in basso a sinistra della finestra del software.
2. Viene visualizzata una finestra per confermare che si desidera chiudere il programma.
3. Fare clic su [Yes] (Sì) per chiudere il programma o su [No] (No) per riprendere la sessione di Plasma-SeqSensei™ IVD Software.






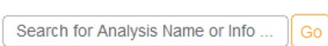

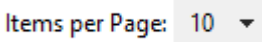
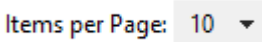


5.2 Panoramica delle icone e delle funzioni


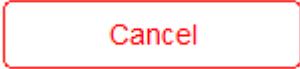

Icona	Funzione
	Torna alla schermata iniziale
	Chiudi il software
	Connessione attiva al server di aggiornamento non disponibile
	Collegamento alle informazioni tecniche e alle IFU del Plasma-SeqSensei™ IVD Kit e Software
	Informazioni sul software/Software Open Source

5 Fasi iniziali e layout della finestra del programma


Icona	Funzione
<p>UPDATE AVAILABLE </p>	<p>Aggiornamento disponibile per Plasma-SeqSensei™ IVD Software</p>
<p>NEW ASSAY AVAILABLE </p>	<p>Nuovo saggio Plasma-SeqSensei™ IVD disponibile</p>
<p>RUN PLANNING DATA ANALYSIS REPORTING</p>	<p>Le schede di selezione dei moduli, per passare da un modulo all'altro, sono sempre visibili.</p>
<p>RUN PLANNING</p>  <p>RUN PLANNING</p>	<p>Modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa)</p>
<p>DATA ANALYSIS</p>  <p>DATA ANALYSIS</p>	<p>Modulo "Data Analysis" (Analisi dei dati)</p>
<p>REPORTING</p>  <p>REPORTING</p>	<p>Modulo "Reporting" (Refertazione)</p>
<p>Reset</p>	<p>Elimina tutti i valori inseriti nella pagina attuale del modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa).</p>
<p>Back</p>	<p>Vai alla pagina precedente del modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa).</p>
<p>Next</p>	<p>Vai alla pagina successiva del modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa).</p>
	<p>Elimina il campione nel modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa).</p>

5 Fasi iniziali e layout della finestra del programma

Icona	Funzione
	Esporta il file selezionato nel modulo “Run Planning” (Pianificazione della corsa).
	Naviga per selezionare le cartelle/i file desiderati nel modulo “Data Analysis” (Analisi dei dati).
	Avvia l'analisi dei dati.
	Ricarica la pagina affinché includa i dati più recenti nel modulo “Reporting” (Refertazione).
	Torna alla panoramica del modulo “Reporting” (Refertazione)
	Cerca i risultati delle analisi nel modulo “Reporting” (Refertazione).
	Passa a pagine diverse dei risultati delle analisi nel modulo “Reporting” (Refertazione).
	Modifica il numero di voci visibili per pagina (da 5 a 50) nel modulo “Reporting” (Refertazione).
	Esporta tutti i referti in PDF dalla corsa selezionata
	Scarica il file .bam dal campione selezionato.
	Scarica il file .vcf dal campione selezionato.

Icona	Funzione
	Scarica il file/referto in PDF dal campione selezionato.
	Interrompi e annulla il processo di analisi nel modulo "Data Analysis" (Analisi dei dati).
	Elimina i dati di una specifica corsa nel modulo "Reporting" (Refertazione).

5.3 Panoramica dell'interfaccia utente

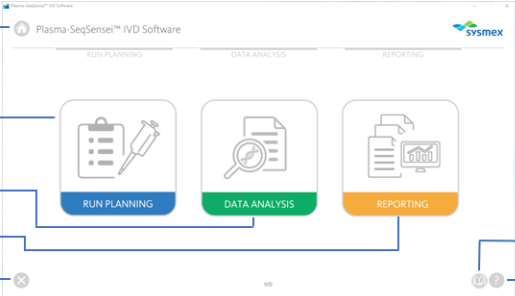

1 Plasma-SeqSense™ IVD Software

2 RUN PLANNING

3 DATA ANALYSIS

4 REPORTING

5

6

7

- ① Torna alla schermata iniziale
- ② Modulo "Run Planning"
- ③ Modulo "Data Analysis"
- ④ Modulo "Reporting"
- ⑤ Chiudi il software
- ⑥ Manuale d'uso
- ⑦ Informazioni sul software

5.3.1 Modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa)



1 Plasma-SeqSense™ IVD Software


2

3


4

- ① Torna alla schermata iniziale
- ② Chiudi il software
- ③ Manuale d'uso
- ④ Informazioni sul software


5 Fasi iniziali e layout della finestra del programma

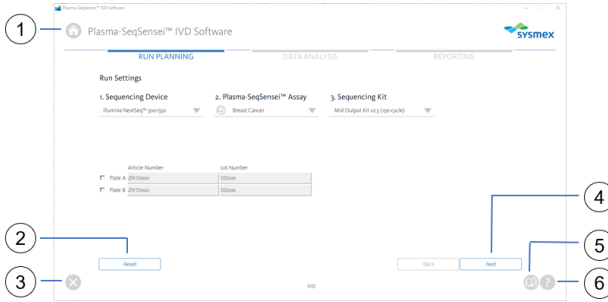

- ① Torna alla schermata iniziale
- ② Reimposta dati inseriti
- ③ Chiudi il software
- ④ Pagina successiva
- ⑤ Manuale d'uso
- ⑥ Informazioni sul software

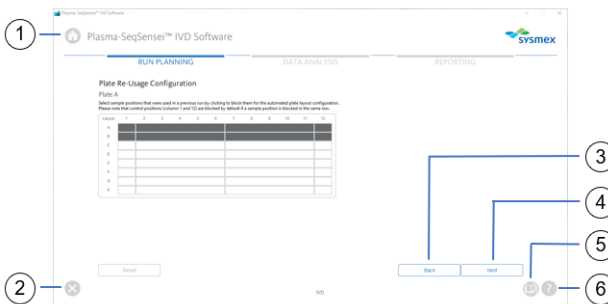

- ① Torna alla schermata iniziale
- ② Chiudi il software
- ③ Pagina precedente
- ④ Pagina successiva
- ⑤ Manuale d'uso
- ⑥ Informazioni sul software

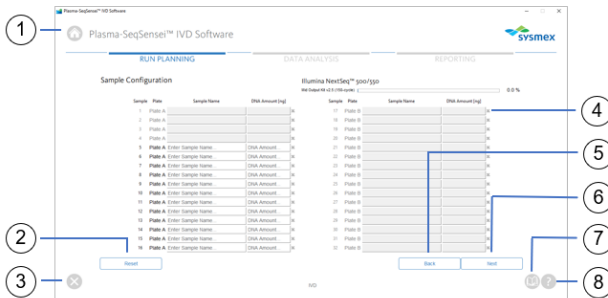

- ① Torna alla schermata iniziale
- ② Reimposta dati inseriti
- ③ Chiudi il software
- ④ Elimina campione
- ⑤ Pagina precedente
- ⑥ Pagina successiva
- ⑦ Manuale d'uso
- ⑧ Informazioni sul software

5 Fasi iniziali e layout della finestra del programma

1 Plasma-SeqSense™ IVD Software

2

3

4

5

6

- ① Torna alla schermata iniziale
- ② Chiudi il software
- ③ Pagina precedente
- ④ Pagina successiva
- ⑤ Manuale d'uso
- ⑥ Informazioni sul software

1 Plasma-SeqSense™ IVD Software

2

3

4

5

6

- ① Torna alla schermata iniziale
- ② Chiudi il software
- ③ Pagina precedente
- ④ Pagina successiva
- ⑤ Manuale d'uso
- ⑥ Informazioni sul software

1 Plasma-SeqSense™ IVD Software

2

3

4


5

6


- ① Torna alla schermata iniziale
- ② Chiudi il software
- ③ Pagina precedente
- ④ Pagina successiva
- ⑤ Manuale d'uso
- ⑥ Informazioni sul software

5 Fasi iniziali e layout della finestra del programma


5.3.2 Modulo “Data Analysis” (Analisi dei dati)

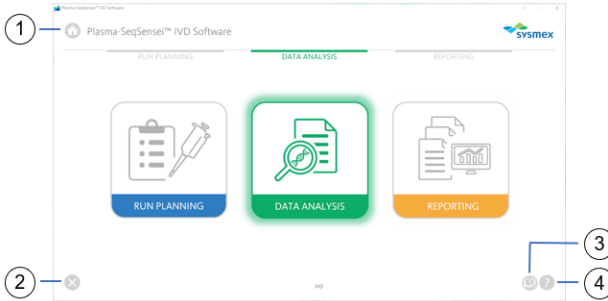

- 1 Torna alla schermata iniziale
- 2 Chiudi il software
- 3 Manuale d'uso
- 4 Informazioni sul software

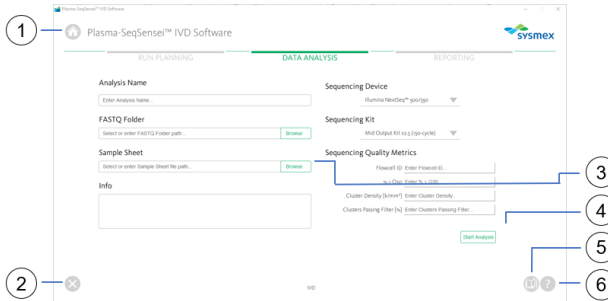


- 1 Torna alla schermata iniziale
- 2 Chiudi il software
- 3 Sfoglia file / cartella
- 4 Avvia analisi
- 5 Manuale d'uso
- 6 Informazioni sul software

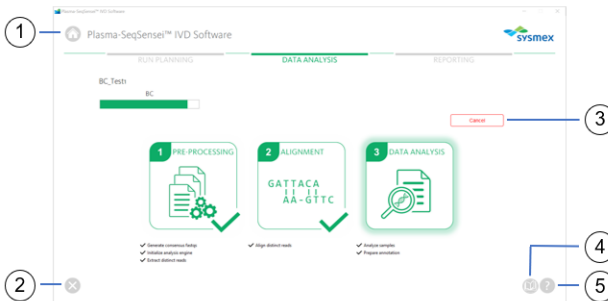


- 1 Torna alla schermata iniziale
- 2 Chiudi il software
- 3 Annulla analisi
- 4 Manuale d'uso
- 5 Informazioni sul software

5.3.3 Modulo “Reporting” (Refertazione)

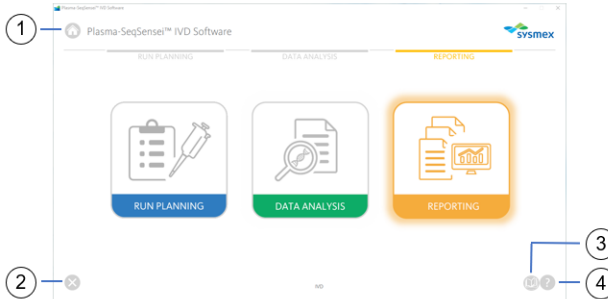

- ① Torna alla schermata iniziale
- ② Chiudi il software
- ③ Manuale d'uso
- ④ Informazioni sul software

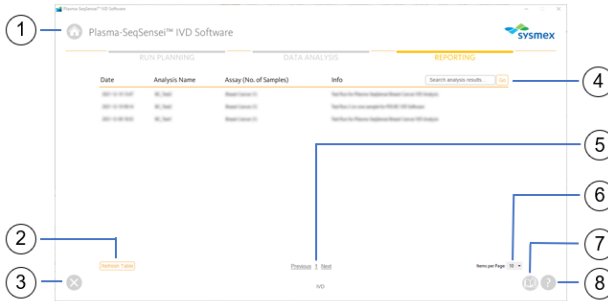


- ① Torna alla schermata iniziale
- ② Aggiorna / ricarica tabella
- ③ Chiudi il software
- ④ Campo di inserimento per la ricerca dei risultati dell'analisi
- ⑤ Pagina precedente/successiva
- ⑥ Regola il numero di voci visibili per pagina
- ⑦ Manuale d'uso
- ⑧ Informazioni sul software



- ① Torna alla schermata iniziale
- ② Esporta tutti i referti in PDF
- ③ Torna alla panoramica de modulo “Reporting”
- ④ Chiudi il software
- ⑤ Elimina risultati
- ⑥ Manuale d'uso
- ⑦ Informazioni sul software

6 Moduli di Plasma-SeqSensei™ IVD Software

6.1 Modulo “Run Planning” (Pianificazione della corsa)

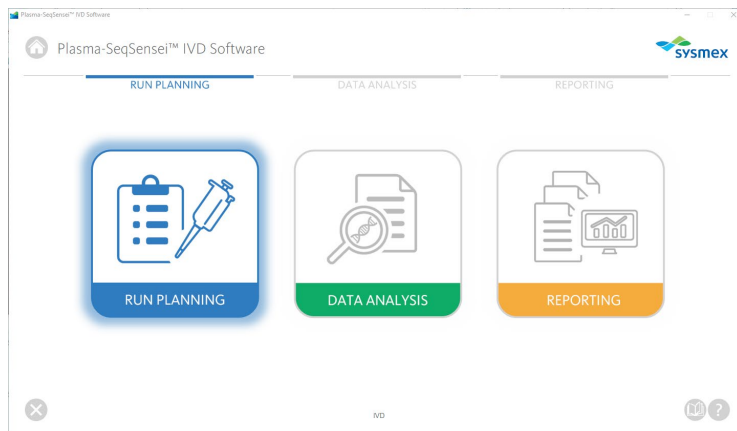


Il modulo “Run Planning” (Pianificazione della corsa) (di colore blu) è utilizzato per pianificare la corsa di sequenziamento, inclusi:

- Tipo di analisi
- Dispositivo di sequenziamento
- Utilizzo del kit di sequenziamento
- Tipo di piastra (A e/o B)
- Numero del campione
- Nome del campione
- Concentrazione del campione
- Posizione del campione sulla piastra
- Generazione della scheda campione
- Layout della piastra

Utilizzare la scheda campione per consentire la demultiplazione e la rifilatura dell'adattatore dei dati a valle con diverse configurazioni possibili. Le funzioni di demultiplazione e di rifilatura dell'adattatore non sono incluse nel software di analisi fornito (vedere ► capitolo 4.1 *Acquisizione dei dati*, pagina 9/61).

È necessario eseguire la pianificazione della corsa dopo la quantificazione Qubit™ dei campioni di cfDNA e prima di avviare la UMI-PCR.

Nota bene: La misurazione Qubit dei campioni rappresenta un'approssimazione grezza della quantità di DNA per determinare il carico del campione. La quantificazione finale (e possibilmente diversa) dei campioni verrà eseguita durante il sequenziamento della libreria utilizzando il quantificatore interno (Quantispike).

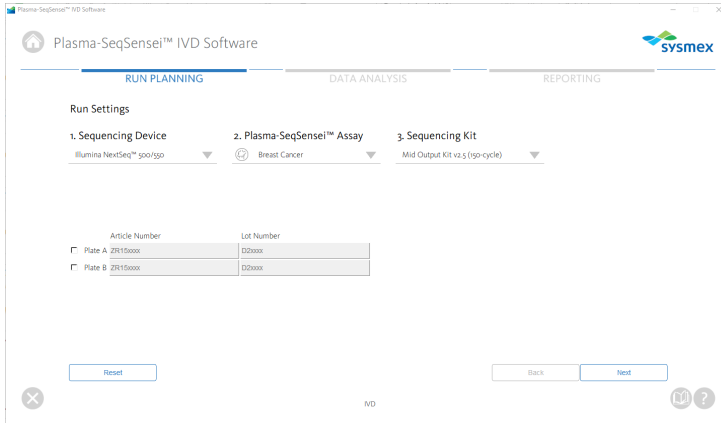

1. Fare clic sul modulo “Run Planning” (Pianificazione della corsa) (di colore blu).
2. Selezionare le impostazioni della corsa
 - a. Selezionare un dispositivo di sequenziamento.
 - b. Selezionare il Plasma-SeqSensei™ Assay da utilizzare.
 - c. Selezionare il kit di sequenziamento da utilizzare.
 - d. Selezionare la piastra da utilizzare (A e/o B) e inserire il numero articolo (nel formato ZR15xxxx) e il numero di lotto (nel formato D2xxxx) del Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific Kit da utilizzare.

Nota bene: Se si elaborano più di 16 campioni in una singola corsa (fino a un massimo di 32 campioni), sono necessari due Plasma-SeqSensei™ IVD Kit e il Plasma-SeqSensei™ Extension IVD Kit con la piastra B.

Importante: Non utilizzare lo stesso tipo di piastra due volte nella stessa corsa!

- e. In caso di errore, è possibile eliminare tutti i valori inseriti facendo clic sul pulsante [Reset] (Reimposta) nell'angolo in basso a sinistra della pagina.
 - f. Viene visualizzata una finestra per confermare che si desidera reimpostare la pagina.
3. Fare clic su [Next] (Avanti). Viene visualizzata una finestra che chiede se la piastra indicata è stata già utilizzata in precedenza.



- a. Selezionare [Yes] (Sì) o [No] (No).
- b. Se è stato selezionato [Yes] (Sì), viene visualizzata una nuova schermata dove è possibile indicare le posizioni della piastra utilizzate nelle corse precedenti, per impedire l'uso ripetuto dei pozzetti vuoti della piastra Plasma-SeqSensei™ Index Primer Plate. Tali pozzetti non saranno selezionabili nelle ulteriori fasi di pianificazione di questa corsa.

Nota bene: *I pozzetti nella colonna 1 (Positive Control) e nella colonna 12 (No Template Control) sono selezionati automaticamente.*

Plate Re-Usage Configuration

Plate A

Select sample positions that were used in a previous run by clicking to block them for the automated plate layout configuration. Please note that control positions (column 1 and 12) are blocked by default if a sample position is blocked in the same row.

Layout	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

- c. Fare clic su [Next] (Avanti) per passare alla pagina successiva o andare [Back] (Indietro) di una pagina per modificare i valori inseriti in precedenza.
4. Nella tabella “Sample Configuration” (Configurazione del campione), inserire il nome e la concentrazione dei campioni.

Nota bene: È possibile inserire rapidamente i nomi e le concentrazioni dei campioni utilizzando la funzione copia-incolla con i valori contenuti in due colonne di un foglio Excel.

- a. Inserire nomi dei campioni univoci (minimo 2 campioni) senza caratteri speciali; sono consentiti solo caratteri alfanumerici. Il software esegue un controllo di conformità.

Nota bene: I campioni vengono ordinati automaticamente dal software secondo la posizione del primo pozzetto vuoto sulla singola piastra quando si passa alla pagina successiva.

- b. Inserire la concentrazione del campione in ng/116 µl di eluato per campione (utilizzando il punto come separatore decimale, ad es. 8.5 ng). La quantità del campione deve rientrare negli intervalli di quantità specifici per l'analisi. Il software esegue un controllo di conformità quando si passa alla pagina successiva.

Sample Configuration

Sample	Plate	Sample Name	DNA Amount [ng]	
1	Plate A			✕
2	Plate A			✕
3	Plate A			✕
4	Plate A			✕
5	Plate A	Sample1	44	✕
6	Plate A	Sample2	4.3	✕
7	Plate A	Sample3	73.9	✕
8	Plate A	Sample4	80	✕
9	Plate A	Sample5	79.2	✕
10	Plate A	Sample6	12	✕
11	Plate A	Sample7	40.1	✕
12	Plate A	Enter Sample Name	DNA Amount	✕
13	Plate A	Enter Sample Name	DNA Amount	✕
14	Plate A	Enter Sample Name	DNA Amount	✕
15	Plate A	Enter Sample Name	DNA Amount	✕
16	Plate A	Enter Sample Name	DNA Amount	✕

Illumina NextSeq™ 500/550
Max Output 10.12 G (115.49 Mb)

89.5 %

Sample	Plate	Sample Name	DNA Amount [ng]	
17	Plate B			✕
18	Plate B			✕
19	Plate B			✕
20	Plate B			✕
21	Plate B			✕
22	Plate B			✕
23	Plate B			✕
24	Plate B			✕
25	Plate B			✕
26	Plate B			✕
27	Plate B			✕
28	Plate B			✕
29	Plate B			✕
30	Plate B			✕
31	Plate B			✕
32	Plate B			✕

- c. È possibile eliminare i nomi dei campioni e le concentrazioni facendo clic sulla "X" alla fine di ogni riga, oppure è possibile reimpostare tutti i valori inseriti facendo clic sul pulsante [Reset] (Reimposta) nell'angolo in basso a sinistra della finestra.
 - i. Viene visualizzata una finestra per confermare che si desidera eliminare il campione selezionato o l'intera pagina.
 - ii. Dopo aver selezionato [OK] (OK) o [Yes] (Sì), è possibile aggiungere nuovi nomi e concentrazioni dei campioni.
- d. Nell'angolo in alto a destra è rappresentata la capacità di Read del kit di sequenziamento selezionato (le barre di

colore blu e verde rientrano negli intervalli di accettabilità, mentre una barra grigia indica il sovraccarico del kit di sequenziamento selezionato).



- e. Fare clic su [Next] (Avanti) per passare alla pagina successiva o andare [Back] (Indietro) di una pagina per modificare i valori inseriti in precedenza.

5. Controllare attentamente i valori inseriti nel riepilogo della piastra.

Plasma-SeqSensei™ IVD Software

Plasma-SeqSensei™ Assay: Breast Cancer
Lot Number: D2222
Article Number: ZR150544

Layout	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C	PC		Sample1					Sample2				NTC
D			Sample1					Sample2				
E												
F												
G												
H												

Plate Locations	Plasma-SeqSensei™ Assay	Sample Name	DNA Amount (ng)	Target Read Count
C01	Breast Cancer	PC	4.0	1250914
C12	Breast Cancer	NTC	0.0	0
C02, C03, C04, C05, C06	Breast Cancer	Sample1	40.0	11655012
C07, C08, C09, C10, C11	Breast Cancer	Sample2	40.0	11742424
D02, D03, D04, D05, D06	Breast Cancer	Sample3	50.0	14569765
D07, D08, D09, D10, D11	Breast Cancer	Sample4	60.0	23310023

Reset Back Next

- a. Sono visualizzati l'analisi Plasma-SeqSensei™, il numero di lotto e il numero articolo.
- b. I pozzetti che saranno utilizzati nella corsa sono evidenziati e riportano i nomi dei campioni e se si tratta di Positive Control (PC) o No Template Control (NTC).
- c. I pozzetti utilizzati in precedenza sono indicati in colore grigio scuro.
- d. La posizione della piastra, l'analisi Plasma-SeqSensei™, il nome del campione, la sua concentrazione in ng e i conteggi

di Read target sono indicati in un elenco nella metà inferiore della schermata.

- e. Fare clic su [Next] (Avanti) per passare alla pagina successiva o andare [Back] (Indietro) di una pagina per modificare i valori inseriti in precedenza.

6. Controllare i valori inseriti nel “Sequencing Run Summary” (Riepilogo corsa di sequenziamento), che indica i seguenti parametri:

Plasma-SeqSensei™ IVD Software

Plasma-SeqSensei™ IVD Software

sysmex

RUN PLANNING DATA ANALYSIS REPORTING

Sequencing Run Summary

Plasma-SeqSensei™ Assay: Breast Cancer

Number of Samples: 4

Plate A

Article Number: ZR160644

Lot Number: D2222

Sequencing Device: Illumina NextSeq™ 500/550

Sequencing Kit: Mid Output Kit v2.5 (150-cycle)

Indexing Type: single

Total DNA input [ng]: 214.6

Total Target Reads: 62509138

Sequencing Capacity Usage: 56.8%

Reset

Back Next

Plate A


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C	PK	Sample1	Sample2	Sample3	Sample4	NTL						
D												
E												
F												
G												
H												

Plate B

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
F												
G												
H												

- Analisi Plasma-SeqSensei™
 - Numero di campioni
 - Piastra utilizzata con numero articolo e numero di lotto
 - Dispositivo di sequenziamento
 - Kit di sequenziamento
 - Tipo di indicizzazione (compilato automaticamente)
 - Quantità totale di DNA (in ng)
 - Read target totali (compilato automaticamente)
 - Utilizzo della capacità di sequenziamento (compilato automaticamente)
 - Layout di entrambe le possibili piastre
- a. Fare clic su [Next] (Avanti) per passare alla pagina successiva o andare [Back] (Indietro) di una pagina per modificare i valori inseriti in precedenza.

7. Nella pagina “File Exports” (Esportazioni file) vengono visualizzati tre file. Se necessario, è possibile scegliere di esportarli come file .csv (scheda campione) o file .xls (layout della piastra).

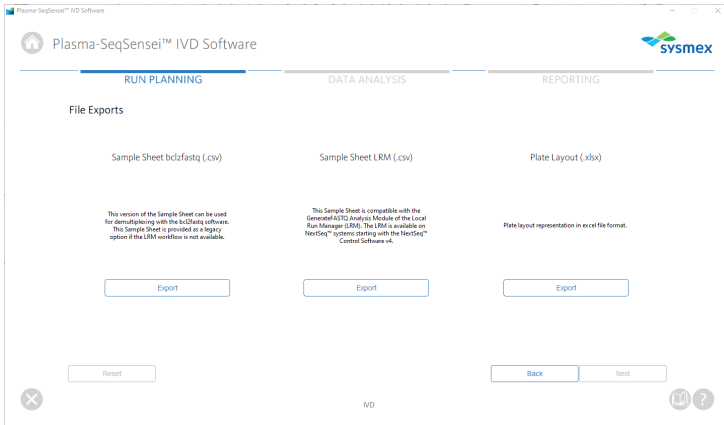

- Per esportare una scheda campione o un layout della piastra specifici, fare clic sul pulsante [Export] (Esporta), selezionare la posizione nel computer o nella rete e fare clic su [Save] (Salva).
- È possibile esportare il layout della piastra (.xlsx) a scopi di documentazione.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Plate #												
2													
3	Sample Sheet CSV	Breast Cancer_Sample0	Breast Cancer_Sample0	Breast Cancer_Sample0	Breast Cancer_Sample0	Breast Cancer_Sample0	Breast Cancer_Sample0	Breast Cancer_Sample0	Breast Cancer_Sample0	Breast Cancer_Sample0	Breast Cancer_Sample0	Breast Cancer_Sample0	Breast Cancer_Sample0
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12	Plate #	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

- La scheda campione LRM (.csv) al centro della schermata viene applicato quando si avvia la corsa di sequenziamento utilizzando il Local Run Manager (LRM) di Illumina, Inc. Quando si carica la scheda campione LRM nel software LRM del dispositivo di sequenziamento, modulo “GenerateFASTQ” deve essere selezionato.

Importante: In “Advanced Module Settings” (Modulo delle Impostazioni avanzate), l’“Adapter” (Adattatore) e la sua sequenza (evidenziati in giallo nella scheda campione di

esempio che segue) devono essere inclusi affinché la rifilatura dell'adattatore sia corretta.

Esempio A (LRM, una piastra):

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	[Header],,,,,,									
2	1EMFileVersion,4,,,,,									
3	Experiment Name,BCIVDLRM,,,,,									
4	Date,2022-05-09 12:08:02.863719,,,,,									
5	Workflow,GenerateFASTQ,,,,,									
6	Application,FASTQ Only,,,,,									
7	Assay,TruSeq LT,,,,,									
8	safeSeq_sw,1.1.7,,,,,									
9	Chemistry,Default,,,,,									
10	BC_IVD1,D20000,None,,,,,									
11										
12	[Reads],,,,,,									
13	148,,,,,									
14										
15	[Settings],,,,,,									
16	Adapter,AGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCA,,,,,									
17										
18	[Data],,,,,,									
19	Sample_ID,Sample_Name,Sample_Plate,Sample_Well,I7_Index_ID,index,Sample_Project,Description									
20	BC_IVD1_NTcplatea_0_C12_a,BC_IVD1_NTcplatea_0_C12_a,a,C12,C12,TCGTACTAC,BCIVDLRM,									
21	BC_IVD1_Pcplatea_43_C01_a,BC_IVD1_Pcplatea_43_C01_a,a,C01,C01,CATGTACTAC,BCIVDLRM,									
22	BC_IVD1_Sample1_120_C02_a,BC_IVD1_Sample1_120_C02_a,a,C02,C02,GTCAGACTAG,BCIVDLRM,									
23	BC_IVD1_Sample1_120_C03_a,BC_IVD1_Sample1_120_C03_a,a,C03,C03,ATAGATCGCG,BCIVDLRM,									
24	BC_IVD1_Sample1_120_C04_a,BC_IVD1_Sample1_120_C04_a,a,C04,C04,TCGTACTACAG,BCIVDLRM,									
25	BC_IVD1_Sample1_120_C05_a,BC_IVD1_Sample1_120_C05_a,a,C05,C05,ATCGAGAGAG,BCIVDLRM,									
26	BC_IVD1_Sample1_120_C06_a,BC_IVD1_Sample1_120_C06_a,a,C06,C06,TAGTCTGAGAG,BCIVDLRM,									
27	BC_IVD1_Sample2_450_C07_a,BC_IVD1_Sample2_450_C07_a,a,C07,C07,AGTGTACTCTG,BCIVDLRM,									
28	BC_IVD1_Sample2_450_C08_a,BC_IVD1_Sample2_450_C08_a,a,C08,C08,CACAGTCTCA,BCIVDLRM,									
29	BC_IVD1_Sample2_450_C09_a,BC_IVD1_Sample2_450_C09_a,a,C09,C09,TATGATCGCG,BCIVDLRM,									

Esempio B (LRM, due piastre):

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	[Header],,,,,,											
2	1EMFileVersion,4,,,,,											
3	Experiment Name,BCIVDLRM2,,,,,											
4	Date,2022-05-09 12:16:33.881398,,,,,											
5	Workflow,GenerateFASTQ,,,,,											
6	Application,FASTQ Only,,,,,											
7	Assay,TruSeq LT,,,,,											
8	safeSeq_sw,1.1.7,,,,,											
9	Chemistry,Default,,,,,											
10	BC_IVD1,D20000,D20000,,,,,											
11												
12	[Reads],,,,,,											
13	148,,,,,											
14												
15	[Settings],,,,,,											
16	Adapter,AGATCGGAAGAGCACACGTCTGAACTCCAGTCA,,,,,											
17												
18	[Data],,,,,,											
19	Sample_ID,Sample_Name,Sample_Plate,Sample_Well,I7_Index_ID,index,Index2,Sample_Project,Description											
20	BC_IVD1_NTcplateaplx0_0_A12_a,BC_IVD1_NTcplateaplx0_0_A12_a,a,A12,A12,ACTAGATCGT,a,TTGTATCTGG,BCIVDLRM2,											
21	BC_IVD1_NTcplateaplx1_0_A12_a,BC_IVD1_NTcplateaplx1_0_A12_a,a,A12,A12,ACTAGATCGT,a,CAACCAAGCA,BCIVDLRM2,											
22	BC_IVD1_NTcplateaplx2_0_A12_a,BC_IVD1_NTcplateaplx2_0_A12_a,a,A12,A12,ACTAGATCGT,a,GGACGGTGT,BCIVDLRM2,											
23	BC_IVD1_NTcplateaplx3_0_A12_a,BC_IVD1_NTcplateaplx3_0_A12_a,a,A12,A12,ACTAGATCGT,a,CCAACGGTAA,BCIVDLRM2,											
24	BC_IVD1_NTcplateaplx0_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplateaplx0_0_A12_b,b,A12,A12,ACTAGATCGT,b,CTCACTGTA,BCIVDLRM2,											
25	BC_IVD1_NTcplateaplx1_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplateaplx1_0_A12_b,b,A12,A12,ACTAGATCGT,b,GTCGGTACT,BCIVDLRM2,											
26	BC_IVD1_NTcplateaplx2_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplateaplx2_0_A12_b,b,A12,A12,ACTAGATCGT,b,CTACTCTTG,BCIVDLRM2,											
27	BC_IVD1_NTcplateaplx3_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplateaplx3_0_A12_b,b,A12,A12,ACTAGATCGT,b,CTCCACTGSA,BCIVDLRM2,											
28	BC_IVD1_Pcplateaplx0_43_A01_a,BC_IVD1_Pcplateaplx0_43_A01_a,a,A01,A01,CTACAGCAGT,a,TTGTATCTGG,BCIVDLRM2,											
29	BC_IVD1_Pcplateaplx1_43_A01_a,BC_IVD1_Pcplateaplx1_43_A01_a,a,A01,A01,CTACAGCAGT,a,CAACCAAGCA,BCIVDLRM2,											
30	BC_IVD1_Pcplateaplx2_43_A01_a,BC_IVD1_Pcplateaplx2_43_A01_a,a,A01,A01,CTACAGCAGT,a,GGACGGTGT,BCIVDLRM2,											
31	BC_IVD1_Pcplateaplx3_43_A01_a,BC_IVD1_Pcplateaplx3_43_A01_a,a,A01,A01,CTACAGCAGT,a,CCAACGGTAA,BCIVDLRM2,											
32	BC_IVD1_Pcplateaplx0_43_A01_b,BC_IVD1_Pcplateaplx0_43_A01_b,b,A01,A01,CTACAGCAGT,b,CTCCACTGSA,BCIVDLRM2,											
33	BC_IVD1_Pcplateaplx1_43_A01_b,BC_IVD1_Pcplateaplx1_43_A01_b,b,A01,A01,CTACAGCAGT,b,GTCGGTACT,BCIVDLRM2,											
34	BC_IVD1_Pcplateaplx2_43_A01_b,BC_IVD1_Pcplateaplx2_43_A01_b,b,A01,A01,CTACAGCAGT,b,CTACTCTTG,BCIVDLRM2,											
35	BC_IVD1_Pcplateaplx3_43_A01_b,BC_IVD1_Pcplateaplx3_43_A01_b,b,A01,A01,CTACAGCAGT,b,ACTGCGTAA,BCIVDLRM2,											
36	BC_IVD1_Sample1pldx0_120_A02_a,BC_IVD1_Sample1pldx0_120_A02_a,a,A02,A02,ACACTGATG,a,TTGTATCTGG,BCIVDLRM2,											

- d. La scheda campione bcl2fastq (.csv) a sinistra della schermata viene utilizzata quando il software Illumina bcl2fastq viene applicato per la demultiplicazione, la rifilatura dell'adattatore e la generazione del file FASTQ.

Esempio A (bcl2fastq, una piastra):


#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	[Header],,,,,,,									
2	!EMFileVersion,4,,,,,									
3	Experiment Name,BCIVDbcl2fastq,,,,,									
4	Date,2022-05-09 12:07:50.975042,,,,,									
5	Workflow,GenerateFASTQ,,,,,									
6	Application,FASTQ Only,,,,,									
7	Assay,TruSeq LT,,,,,									
8	safeseq_sw,1.1.7,,,,,									
9	Chemistry,Default,,,,,									
10	BC_IVD1,D20000,None,,,,,									
11										
12	[Reads],,,,,,									
13	148,,,,,									
14										
15	[Settings],,,,,,									
16	FilterPCRDuplicates,0,,,,,									
17	ReverseComplement,0,,,,,									
18	VariantFilterQualityCutoff,30,,,,,									
19	outputgenomevcf,FALSE,,,,,									
20	Adapter,AGATCGGAAGAGCACAGCTGAACTCCAGTCA,,,,,									
21										
22	[Data],,,,,,									
23	Sample_ID,Sample_Name,Sample_Plate,Sample_Well,I7_Index_ID,index,Sample_Project,Description									
24	BC_IVD1_NTcplatea_0_C12_a,BC_IVD1_NTcplatea_0_C12_a_a,C12,C12,TCGCTACTAC,BCIVDbcl2fastq,									
25	BC_IVD1_PCplatea_43_C01_a,BC_IVD1_PCplatea_43_C01_a_a,C01,C01,CATGTGATAC,BCIVDbcl2fastq,									
26	BC_IVD1_Sample1_120_C02_a,BC_IVD1_Sample1_120_C02_a_a,C02,C02,CTCAGACGAG,BCIVDbcl2fastq,									
27	BC_IVD1_Sample1_120_C03_a,BC_IVD1_Sample1_120_C03_a_a,C03,C03,ATAGATCGCG,BCIVDbcl2fastq,									
28	BC_IVD1_Sample1_120_C04_a,BC_IVD1_Sample1_120_C04_a_a,C04,C04,TCGTACACAG,BCIVDbcl2fastq,									
29	BC_IVD1_Sample1_120_C05_a,BC_IVD1_Sample1_120_C05_a_a,C05,C05,ATCGAGAGAG,BCIVDbcl2fastq,									
30	BC_IVD1_Sample1_120_C06_a,BC_IVD1_Sample1_120_C06_a_a,C06,C06,TACTCGGACAG,BCIVDbcl2fastq,									
31	BC_IVD1_Sample2_450_C07_a,BC_IVD1_Sample2_450_C07_a_a,C07,C07,AGTGACTCTG,BCIVDbcl2fastq,									
32	BC_IVD1_Sample2_450_C08_a,BC_IVD1_Sample2_450_C08_a_a,C08,C08,CACAGTCTCA,BCIVDbcl2fastq,									

Esempio B (bcl2fastq, due piastre):

#	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	[Header],,,,,,											
2	!EMFileVersion,4,,,,,											
3	Experiment Name,BCIVDbcl2fastq2,,,,,											
4	Date,2022-05-09 12:16:25.131648,,,,,											
5	Workflow,GenerateFASTQ,,,,,											
6	Application,FASTQ Only,,,,,											
7	Assay,TruSeq LT,,,,,											
8	safeseq_sw,1.1.7,,,,,											
9	Chemistry,Default,,,,,											
10	BC_IVD1,D20000,D20000,,,,,											
11												
12	[Reads],,,,,,											
13	148,,,,,											
14												
15	[Settings],,,,,,											
16	FilterPCRDuplicates,0,,,,,											
17	ReverseComplement,0,,,,,											
18	VariantFilterQualityCutoff,30,,,,,											
19	outputgenomevcf,FALSE,,,,,											
20	Adapter,AGATCGGAAGAGCACAGCTGAACTCCAGTCA,,,,,											
21												
22	[Data],,,,,,											
23	Sample_ID,Sample_Name,Sample_Plate,Sample_Well,I7_Index_ID,index,I5_Index_ID,index2,Sample_Project,Description											
24	BC_IVD1_NTcplatea_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplatea_0_A12_b_a,A12,A12,ACTAGATCGT,a,CCAGATACAA,BCIVDbcl2fastq2,											
25	BC_IVD1_NTcplatea_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplatea_0_A12_b_a,A12,A12,ACTAGATCGT,b,TCGCTGGTGG,BCIVDbcl2fastq2,											
26	BC_IVD1_NTcplatea_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplatea_0_A12_b_a,A12,A12,ACTAGATCGT,a,AAACCGTCC,BCIVDbcl2fastq2,											
27	BC_IVD1_NTcplatea_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplatea_0_A12_b_a,A12,A12,ACTAGATCGT,b,TTACCGTGG,BCIVDbcl2fastq2,											
28	BC_IVD1_NTcplateb_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplateb_0_A12_b_b,A12,A12,ACTAGATCGT,b,TTACCGTGG,BCIVDbcl2fastq2,											
29	BC_IVD1_NTcplateb_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplateb_0_A12_b_b,A12,A12,ACTAGATCGT,b,AGTACCGGAG,BCIVDbcl2fastq2,											
30	BC_IVD1_NTcplateb_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplateb_0_A12_b_b,A12,A12,ACTAGATCGT,b,CAAGTAGTAG,BCIVDbcl2fastq2,											
31	BC_IVD1_NTcplateb_0_A12_b,BC_IVD1_NTcplateb_0_A12_b_b,A12,A12,ACTAGATCGT,b,TATCGCAAGT,BCIVDbcl2fastq2,											
32	BC_IVD1_PCplatea_43_A01_a,BC_IVD1_PCplatea_43_A01_a_a,A01,A01,CTACAGCAGT,a,CCAGATACAA,BCIVDbcl2fastq2,											
33	BC_IVD1_PCplatea_43_A01_a,BC_IVD1_PCplatea_43_A01_a_a,A01,A01,CTACAGCAGT,a,TCGCTGGTGG,BCIVDbcl2fastq2,											
34	BC_IVD1_PCplatea_43_A01_a,BC_IVD1_PCplatea_43_A01_a_a,A01,A01,CTACAGCAGT,a,AAACCGTCC,BCIVDbcl2fastq2,											
35	BC_IVD1_PCplatea_43_A01_a,BC_IVD1_PCplatea_43_A01_a_a,A01,A01,CTACAGCAGT,a,TTACCGTGG,BCIVDbcl2fastq2,											
36	BC_IVD1_PCplateb_43_A01_b,BC_IVD1_PCplateb_43_A01_b_b,A01,A01,CTACAGCAGT,b,TTACCGTGG,BCIVDbcl2fastq2,											

- e. Se occorre modificare i valori inseriti, tornare indietro in alcune pagine facendo clic su [Back] (Indietro) nell'angolo in basso a destra della finestra.

6.2 Modulo “Data Analysis” (Analisi dei dati)

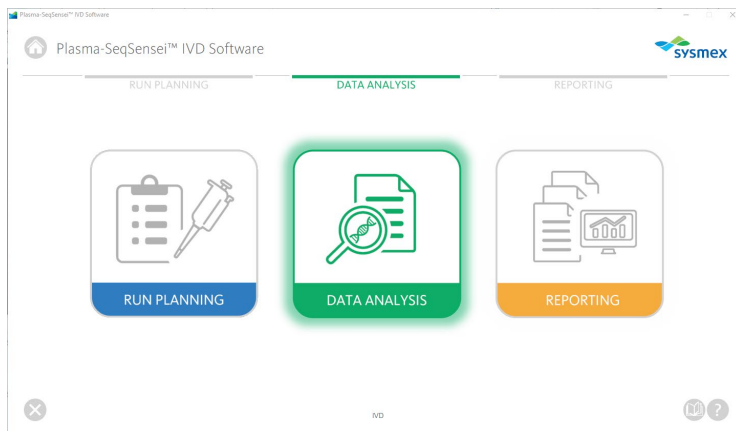

Il modulo “Data Analysis” (Analisi dei dati) (di colore verde) è utilizzato per avviare l’analisi di sequenziamento con:

- File FASTQ compressi (.fastq.gz)
- Scheda campione della corsa preparata nel modulo “Run Planning” (Pianificazione della corsa)

I file FASTQ devono essere salvati in locale sulla stessa unità dove è installato Plasma-SeqSensei™ IVD Software, in un’unica cartella per ciascuna corsa di sequenziamento. Non è consentita la presenza di sottocartelle. In caso di trasferimento dei dati da BaseSpace™ di Illumina, tutti i file .fastq.gz devono essere copiati in un’unica cartella.

Nota bene: *I files .fastq.gz che sono nominati “Undetermined” (Non determinato) non devono essere presenti nella cartella che deve essere analizzata dal software.*

L’analisi viene eseguita dopo la corsa di sequenziamento e al termine delle successive fasi di demultiplazione, rifilatura dell’adattatore e generazione del file FASTQ. Le funzioni di demultiplazione e rifilatura dell’adattatore non sono incluse nel software di analisi fornito e devono essere eseguite prima dell’analisi dei dati (vedere ► capitolo 4.1 *Acquisizione dei dati*, pagina 9/61).

6 Moduli di Plasma-SeqSensei™ IVD Software

Prima di avviare l'analisi dei dati con Plasma-SeqSensei™ IVD Software, verificare i parametri di validità della corsa nel software dello strumento Illumina:

- Densità cluster:
NextSeq™: Media 0 a 220 K/mm²
- Punteggio Q30: ≥ 80 %
- Cluster che superano i filtri (PF): ≥ 80 %

Qualora i parametri di validità della corsa non vengano raggiunti, la corsa non è valida.

The screenshot shows the 'DATA ANALYSIS' tab of the Plasma-SeqSensei™ IVD Software. The interface is divided into three sections: RUN PLANNING, DATA ANALYSIS (highlighted in green), and REPORTING. Under 'Analysis Name', there is a text input field for 'Enter Analysis Name'. Under 'FASTQ Folder', there is a text input field for 'Select or enter FASTQ Folder path...' and a 'Browse' button. Under 'Sample Sheet', there is a text input field for 'Select or enter Sample Sheet file path...' and a 'Browse' button. Under 'Info', there is a large empty text area. On the right side, under 'Sequencing Device', a dropdown menu shows 'Illumina NextSeq™ 500/550'. Under 'Sequencing Kit', a dropdown menu shows 'Mid Output Kit v2.5 (50-cycle)'. Under 'Sequencing Quality Metrics', there are four input fields: 'Flowcell ID' with 'Enter Flowcell ID...', '% > Q30' with 'Enter % > Q30...', 'Cluster Density [k/mm²]' with 'Enter Cluster Density...', and 'Clusters Passing Filter [%]' with 'Enter Clusters Passing Filter...'. A 'Start Analysis' button is located at the bottom right of the form.

1. Fare clic sul modulo “Data Analysis” (Analisi dei dati) (di colore verde).
2. Inserire un nome per l'analisi.
3. Selezionare il dispositivo di sequenziamento utilizzato.
4. Selezionare il kit di sequenziamento.
5. Compilare le metriche di qualità del sequenziamento/i criteri di validità della corsa come mostrato sul dispositivo di sequenziamento:
 - a. ID Flowcell
 - b. % > Q30
 - c. Densità cluster [k/mm²]
 - d. Cluster che superano i filtri [%]

Quando si avvia l'analisi, viene visualizzato un errore se l'ID Flowcell non è stato compilato o se non combacia con l'ID presente nei file da analizzare, oppure se i criteri di validità della corsa sono al di fuori degli intervalli accettabili.


6. Selezionare la cartella che contiene i file FASTQ della corsa di sequenziamento da analizzare (.fastq.gz) facendo clic sul pulsante [Browse] (Sfogliare) e navigando fino alla cartella da selezionare.

Nota bene: *I file .fastq.gz non sono visibili nella finestra di selezione della cartella.*

7. Selezionare la scheda campione creata nel modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa) (.csv) per questa corsa di sequenziamento facendo clic sul pulsante [Browse] (Sfogliare) e navigando fino al file da selezionare.
8. Inserisci le informazioni relative all'esperimento, alla corsa di sequenziamento o all'analisi (opzionale).
9. Fare clic su [Start Analysis] (Avvia analisi).

Qualora manchino dei file, oppure in caso di mancata corrispondenza tra la scheda campione e i nomi dei file, o di selezione della scheda campione errata, il software visualizzerà un messaggio di errore.

10. Verrà visualizzata una finestra che richiede di confermare l'adesione al flusso di lavoro IVD secondo le Istruzioni per l'uso del Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific IVD Kit.

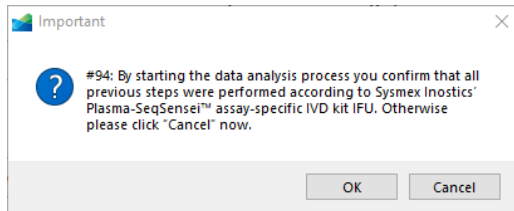


- a. Selezionare [Ok] (Ok) se sono state seguite le Istruzioni per l'uso per avviare l'analisi con certificazione IVD dei risultati del sequenziamento.
- b. Selezionare [Cancel] (Annulla) se non si sono rispettate le Istruzioni per l'uso per il Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific IVD Kit.

Specific IVD Kit, in quanto questi risultati di sequenziamento non sono validi per l'analisi con certificazione IVD.

Nota bene: *Durante l'analisi, si raccomanda di chiudere tutte le altre applicazioni e di disattivare la funzionalità di standby di Windows®.*


A seconda della memoria disponibile, l'analisi può richiedere fino a 6 ore. Qualora l'analisi richieda più tempo, fare riferimento al ► capitolo 8 *Ricerca ed eliminazione dei guasti*, pagina 48/61.

11. Viene visualizzata una nuova finestra che mostra il processo e lo stato di avanzamento dell'analisi dei dati.
 - a. È possibile interrompere l'analisi facendo clic sul pulsante rosso [Cancel] (Annulla) sul lato destro della finestra. Dopo l'interruzione, l'analisi deve essere riavviata dall'inizio; non è possibile mettere in pausa l'analisi.

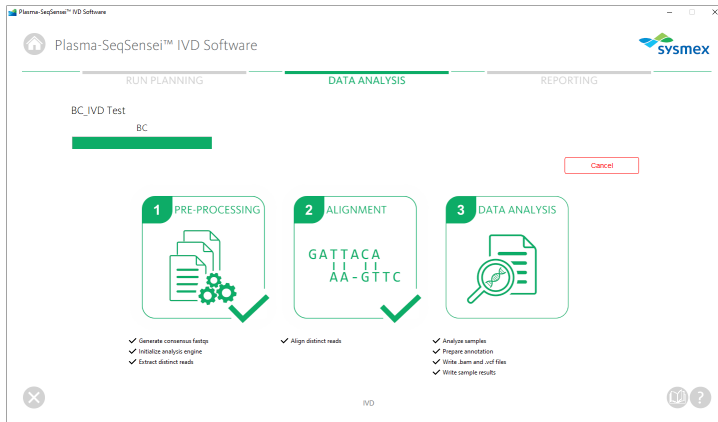

12. Una volta terminata l'analisi dei dati, il software passa automaticamente al modulo "Reporting" (Refertazione) e apre la pagina contenente i risultati dell'analisi della corsa di sequenziamento.


6.3 Modulo “Reporting” (Refertazione)

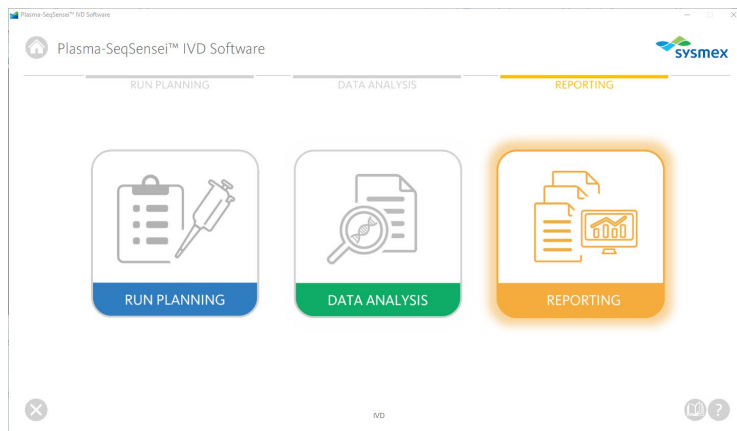

Il modulo “Reporting” (Refertazione) (di colore arancione) è utilizzato per salvare e gestire tutti i risultati delle analisi condotte utilizzando Plasma-SeqSensei™ IVD Software. Esso consente all’utente di:

- visualizzare tutte le corse analizzate sul dispositivo
- visualizzare la directory contenente i file FASTQ di ciascuna corsa
- scaricare i referti (.pdf) e i file .vcf e .bam di ciascuna corsa
- eliminare le corse/i dati

Il modulo “Reporting” (Refertazione) viene avviato automaticamente una volta terminata un’analisi. È possibile accedere in qualsiasi momento a tutte le analisi precedenti condotte sul dispositivo per scaricare o eliminare i dati. I dati possono essere scaricati nei formati .pdf (referti), .vcf o .bam.

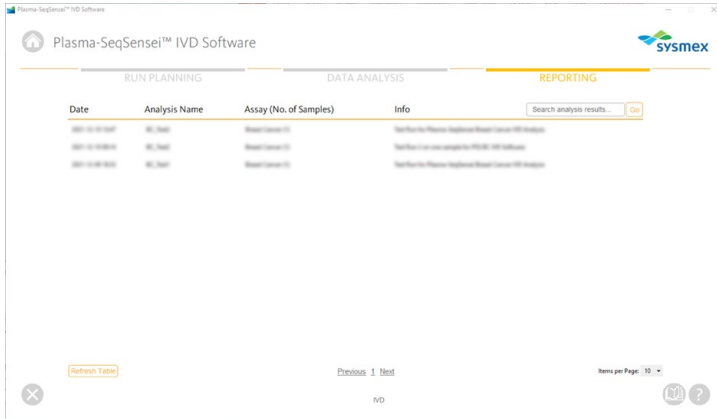

1. Fare clic sul modulo “Reporting” (Refertazione).
2. Qui viene visualizzata una panoramica di tutte le analisi condotte da Plasma-SeqSensei™ IVD Software sul dispositivo.

- a. Per saltare a una specifica pagina nella panoramica, fare clic sul numero della pagina in basso nella finestra o sui pulsanti [Previous] (Indietro)/[Next] (Avanti).

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

- b. Il numero di voci visibili per pagina può essere modificato nell’angolo in basso a destra della finestra.

Items per Page: 10 ▼


- c. Per cercare specifici risultati delle analisi, inserire il nome della corsa nel campo di ricerca nell’angolo in alto a destra della finestra e fare clic sul pulsante [Go] (Vai).

Search for Analysis Name or Info ... [Go](#)

- d. Se si stanno attendendo dati nuovi, fare clic sul pulsante [Refresh Table] (Ricarica tabella) nell’angolo in basso a sinistra della finestra per ricaricare la tabella dei risultati e vedere i nuovi risultati dell’analisi.

[Refresh Table](#)

3. Selezionare il risultato dell'analisi facendoci clic sopra.
4. Nella nuova finestra vengono visualizzati i risultati dell'analisi, che includono:

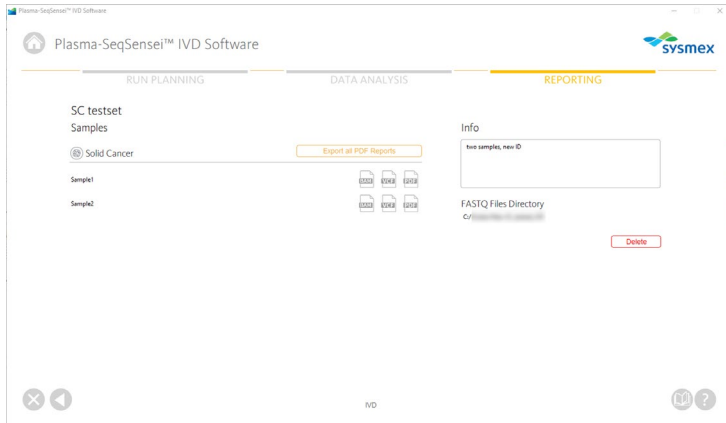

- a. Nome della corsa
- b. Analisi utilizzata per la corsa
- c. Nome di tutti i campioni nella corsa
- d. Informazioni sulla corsa (se inserite nel modulo “Data Analysis” (Analisi dei dati))
- e. Posizione della directory dei file FASTQ utilizzata per l’analisi dei dati
- f. Icone per esportare i referti in formato .pdf e i file .vcf e .bam singolarmente per campione




- g. Pulsante per esportare tutti i referti della corsa selezionata in formato .pdf compressi in un file .zip

Export all PDF Reports

5. Se si desidera esportare dei file, fare clic sull'icona o sul pulsante corrispondente e selezionare il nome e la posizione di esportazione nel dispositivo/sul server.
6. Per eliminare tutti i risultati dell'analisi per la corsa selezionata, fare clic sul pulsante rosso [Delete] (Elimina) nell'angolo in basso a destra della schermata.




Viene visualizzata una finestra per confermare che si desidera eliminare definitivamente tutti i dati.

7. Per tornare alla panoramica del modulo "Reporting" (Refertazione), fare clic sul triangolo di colore bianco nel cerchio grigio nell'angolo in basso a sinistra della finestra del software. 

7 Referti

I referti sono disponibili in formato .pdf.

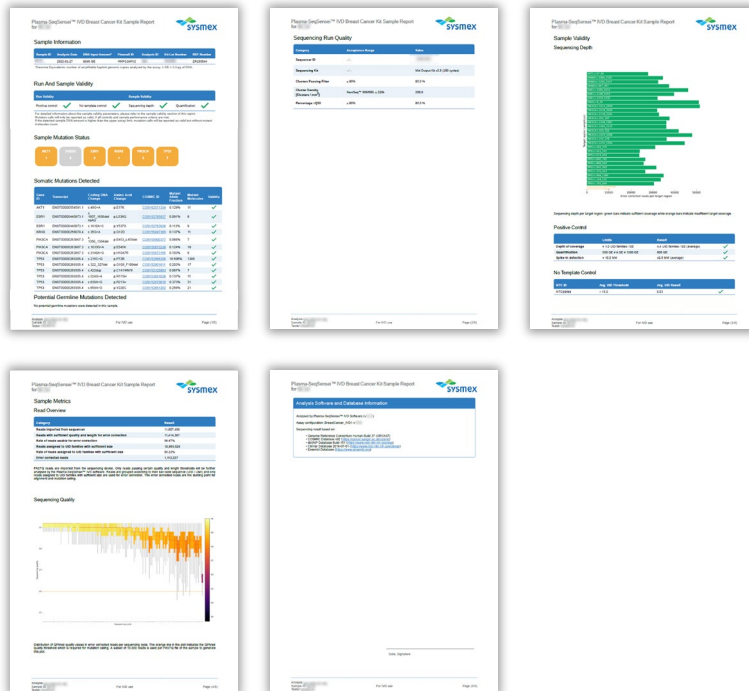

Inoltre, è possibile scaricare file in formato .vcf (variant call format) e .bam (binary alignment map). I file .vcf contengono, tra le altre informazioni disponibili, tutte le mutazioni in frazione di allele mutante (MAF) e in molecole mutanti (MM) mostrate nel referto, in formato standardizzato. I file .bam contengono le informazioni di allineamento delle Read di consenso UMI generate rispetto agli ampliconi dell'analisi. Questi due file possono essere utilizzati per un controllo dettagliato dei risultati dell'analisi con software di terze parti (ad es. Integrative Genomics Viewer (IGV, <https://software.broadinstitute.org/software/igv/>)). Se si utilizza IGV, selezionare "Human hg19" come genoma di riferimento.

I referti generati da Plasma-SeqSensei™ IVD Software contengono diverse sezioni:

- Informazioni sul campione
- Validità della corsa e del campione
 - Profondità di sequenziamento
 - Positive Control
 - No Template Control
- Stato delle mutazioni del campione
 - Ampliconi non valide
- Mutazioni rilevate
 - Mutazioni somatiche
 - Potenziali mutazioni germinali
- Qualità della corsa di sequenziamento
- Metriche del campione
 - Panoramica delle Read
 - Qualità di sequenziamento
- Informazioni sul software di analisi e sul database

Esempio A:

Sample Information

Sample ID	Analysis Date	DNA Input Amount*	Flowcell ID	Analysis ID	Kit Lot Number	REF Number
SampleB	2024-03-15	5290 GE	HHSIG0FX2	BC_Test 131	D20001	ZR150544

*Genome Equivalents: number of amplifiable haploid genomic copies analysed by the assay. 1 GE = 3.3 pg of DNA.

Esempio B:

Sample Information

Sample ID	Analysis Date	DNA Input Amount*	Flowcell ID	Analysis ID	Kit Lot Number	REF Number
SampleA	2024-03-15	Not quantifiable	HHSIG0FX2	BC_Test 131	D20001	ZR150544

*Genome Equivalents: number of amplifiable haploid genomic copies analysed by the assay. 1 GE = 3.3 pg of DNA.

The DNA input is listed as not quantifiable if the detected DNA amount for this sample is outside the valid input range. Alternatively, this error message is also displayed if the quantification of the positive control fails regardless of the sample DNA input or if the coverage of the sequences used for quantification is insufficient.

La sezione **Sample Information** (Informazioni sul campione) contiene un riepilogo dell'analisi del campione selezionata, che include:

- ID del campione
- Data dell'analisi
- Quantità di DNA di analisi in equivalenti genomici (Genome Equivalents, GE) calcolata utilizzando il quantificatore interno (Quantispike); se la quantità di DNA di analisi è al di fuori degli

intervalli validi oppure se la quantificazione del Positive Control fallisce, questa informazione verrà contrassegnata come “Not quantifiable” (non quantificabile).

- ID Flowcell
- ID di analisi assegnato dall'utente per l'analisi di questo set di campioni.
- Numero di lotto del Plasma-SeqSensei™ IVD Kit utilizzato
- Il numero REF indica il numero articolo del Plasma-SeqSensei™ Kit utilizzato.

Esempio A:

Run And Sample Validity

Run Validity		Sample Validity	
Positive control:	✓	No template control:	✓
		Sequencing depth:	✓
		Quantification:	✗

For detailed information about the sample validity parameters, please refer to the sample validity section of this report.
Mutation calls will only be reported as valid, if all controls and sample performance criteria are met.
If the detected sample DNA amount is higher than the upper assay limit, mutation calls will be reported as valid but without mutant molecules count.

Esempio B:

Run And Sample Validity

Run Validity		Sample Validity	
Positive control:	✓	No template control:	✓
		Sequencing depth:	✓
		Quantification:	✓

For detailed information about the sample validity parameters, please refer to the sample validity section of this report.
Mutation calls will only be reported as valid, if all controls and sample performance criteria are met.

La tabella **Run and Sample Validity** (Validità della corsa e del campione) nella prima pagina del referto indica se il campione analizzato rientra nei criteri di validità. I segni di spunta verdi (✓) indicano un risultato valido, mentre le croci rosse (✗) indicano un risultato non valido e il segno di spunta arancione (✓) per la profondità di sequenziamento informa l'utente della presenza di almeno un amplicone non valido dovuto alla bassa copertura del sequenziamento. Ulteriori informazioni su tale amplicone non valido si trovano nella sezione Stato delle mutazioni del campione e nella sezione Profondità di sequenziamento del referto.

La quantificazione dei campioni viene inizialmente eseguita utilizzando la misurazione Qubit, che produce un'approssimazione grezza della quantità di DNA per il carico corretto del campione. La quantificazione nel referto si riferisce alla quantità di DNA del campione determinata dal quantificatore interno (Quantispike).

7 Referti

Se il valore di quantificazione non rientra nell'intervallo consentito (indicato nel campo Informazioni sul campione/Quantità di DNA), il campione non sarà considerato valido e non sarà mostrato alcun risultato nel referto.

L'analisi del campione viene considerata non valida anche qualora il Positive Control, il No Template Control o le metriche di sequenziamento non soddisfino i criteri consentiti.

Esempio:

Sample Mutation Status



La sezione **Sample Mutation Status** (Stato delle mutazioni del campione) fornisce una panoramica in merito a quante mutazioni sono state rilevate per gene analizzato dal Plasma-SeqSensei™ IVD Kit. Se è stata trovata una mutazione, il riquadro viene visualizzato in arancione con il numero di mutazioni riscontrate nel gene indicato sotto il nome del gene. Se in un gene non è stata trovata una mutazione, il riquadro con il nome del gene viene visualizzato in grigio, mentre il numero indicato sarà uno zero.

Esempio:

Important:

Please note that not all amplicons achieved the required minimum coverage. The following genes and coding positions are excluded from this test result and no judgment regarding wildtype or mutation status can be made for these positions:

Gene ID	Coding Sequence
TP53	c.574_659

Verrà inclusa una nota (Importante) se uno o più ampliconi non hanno raggiunto una sufficiente profondità di sequenziamento e sono stati esclusi dalla refertazione (vedere la sezione Validità della corsa e del campione e Profondità di sequenziamento di questo referto). Le posizioni codificanti interessate all'interno del gene specificato sono indicate in una tabella. Le possibili mutazioni presenti in queste regioni non vengono mostrate e lo stato delle mutazioni di queste posizioni geniche non può essere valutato.

Esempio A:

Somatic Mutations Detected

Gene ID	Transcript	Coding DNA Change	Amino Acid Change	COSMIC ID	ClinVar ID	Mutant Allele Fraction	Mutant Molecules
AKT1	ENST00000554581.1	c.49G>A	p.E17K	COSV62571334	13983	0.129%	11
TP53	ENST00000269305.4	c.422dup	p.C141Wfs*8	COSV53125883	844977	0.087%	7
TP53	ENST00000269305.4	c.524G>A	p.R175H	COSV52661038	12374	0.137%	11
TP53	ENST00000269305.4	c.639A>G	p.R213=	COSV52679610	43591	0.373%	31
TP53	ENST00000269305.4	c.659A>G	¹ p. Y220C	COSV52661282	127819	0.256%	21

¹) Partially covered amino acid triplet detected. The amino acid annotation in this report is made based on the assumption that the bases, which are not covered by this assay correspond to the reference sequence.

Esempio B:

Somatic Mutations Detected

No valid somatic mutations were detected in this sample.

Nella sezione **Somatic Mutations Detected** (Mutazioni somatiche rilevate) del referto vengono indicate tutte le mutazioni rilevate da Plasma-SeqSensei™ IVD Software nelle regioni di copertura del gene del Plasma-SeqSensei™ IVD Kit utilizzato, qualora i criteri di validità della corsa e del campione siano stati soddisfatti e la profondità di sequenziamento per l'amplicone sia stata raggiunta.

Nella tabella sono indicate le seguenti informazioni:

- ID del gene
- Numero del trascritto del gene utilizzato durante l'analisi
- Variazione del DNA codificante rilevata
- Variazione degli aminoacidi risultante dalla variazione del DNA codificante:
 - se viene riscontrata una mutazione all'interno della regione intronica del gene, la variazione amminoacidica sarà mostrata come "p.?"
 - se la variazione di coppia di basi viene rilevata in una tripletta di nucleotidi codificante un amminoacido che è solo parzialmente coperta dal saggio, la variazione amminoacidica viene contrassegnata da un ¹). In questo caso, l'annotazione dell'amminoacido viene effettuata assumendo che le basi che non sono coperte dal saggio corrispondano alla sequenza di riferimento.ID COSMIC, se disponibile (numero COSV) nella versione del database utilizzata (fare riferimento all'ultima pagina del referto)

- ID ClinVar, se disponibile nella versione del database utilizzata (fare riferimento all'ultima pagina del referto)
- Frazione di allele mutante
Molecole mutanti (MM) per mutazione rilevate nel campione utilizzando il contenuto di DNA calcolato con il quantificatore interno (Quantispike).

Esempio A:

Potential Germline Mutations Detected

Gene ID	Transcript	Coding DNA Change	Amino Acid Change	dbSNP ID	ClinVar ID	Mutant Allele Fraction	Mutant Molecules
TP53	ENST00000269305.4	c.215C>G	p.P72R	rs1042522	12351	44.211%	2339

Potential germline mutations were detected in this sample.
This classification is based on a mutant allele fraction above 40% and below or equal 60% (heterozygous) or above 90% (homozygous) for the listed mutations.

Esempio B:

Potential Germline Mutations Detected

No potential germline mutations were detected in this sample.

Se rilevate, le **Potential germline mutations** (SNP) (Potenziali mutazioni germinali) vengono indicate in una tabella aggiuntiva. Le mutazioni vengono indicate come potenziali mutazioni germinali quando sono presenti a una MAF da $> 40\%$ a $\leq 60\%$ (eterozigote) o $\geq 90\%$ (omozigote). L'inserimento nel database dbSNP è facoltativo. Per convalidare la mutazione rilevata come mutazione germinale reale occorre eseguire ulteriori test del DNA genomico.

Nella tabella sono indicate le seguenti informazioni:

- ID del gene
- Numero del trascritto del gene utilizzato durante l'analisi
- Variazione del DNA codificante rilevata
- Variazione degli aminoacidi risultante dalla variazione del DNA codificante:
 - se la variazione di coppia di basi viene rilevata in una tripletta di nucleotidi codificante un amminoacido che è solo parzialmente coperta dal saggio, la variazione amminoacidica viene contrassegnata da un ¹⁾. In questo caso, l'annotazione dell'amminoacido viene effettuata assumendo che le basi che non sono coperte dal saggio corrispondano alla sequenza di

riferimento.ID dbSNP, se disponibile nella versione del database utilizzata (fare riferimento all'ultima pagina del referto)

- ID ClinVar, se disponibile nella versione del database utilizzata (fare riferimento all'ultima pagina del referto)
- Frazione di allele mutante
- Molecole mutanti (MM) per mutazione rilevate nel campione utilizzando il contenuto di DNA calcolato con il quantificatore interno (Quantispike).

Esempio:

Sequencing Run Quality

Category	Acceptance Range	Value
Sequencer ID	- / -	
Sequencing Kit	- / -	Mid Output Kit v2.5 (150-cycle)
Clusters Passing Filter	≥ 80%	91.8 %
Cluster Density [Clusters / mm ²]	NextSeq™ 500/550: ≤ 220k	207.0
Percentage >Q30	≥ 80%	92.3 %

La tabella **Sequencing Run Quality** (Qualità della corsa di sequenziamento) include le metriche di qualità del sequenziamento/i criteri di validità della corsa indicati dall'utente all'interno del modulo "Data Analysis" (Analisi dei dati) di Plasma-SeqSensei™ IVD Software. Nella tabella sono indicati gli intervalli di accettabilità (se applicabili) di tali criteri.

Sono indicate le seguenti categorie:


- ID del sequenziatore
- Kit di sequenziamento utilizzato
- Cluster che superano i filtri
- Densità cluster in cluster/mm²
- Percentuale > Q30

Qualora uno dei parametri risulti al di fuori dell'intervallo consentito, la corsa di sequenziamento non sarà valida e dovrà essere ripetuta.

Esempio:

Sample Validity

Sequencing Depth

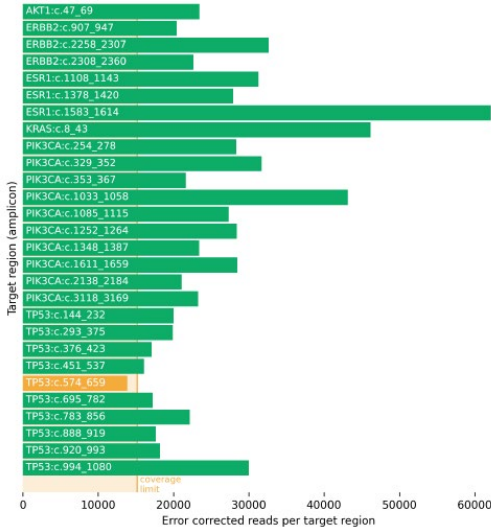

Sequencing depth per target region: green bars indicate sufficient coverage while orange bars indicate insufficient target coverage.

La seconda parte della sezione **Sample Validity** (Validità del campione) include ulteriori dettagli per determinare il motivo di un eventuale fallimento dell'analisi di un campione.

Nella sezione **Sequencing Depth** (Profondità di sequenziamento) viene indicata la copertura di sequenziamento di tutte le regioni/gli ampliconi target analizzati con il Plasma-SeqSensei™ IVD Kit. Le barre verdi rappresentano gli ampliconi con una copertura target sufficiente; le barre arancioni rappresentano gli ampliconi con una copertura target insufficiente. Gli ampliconi marcati in arancione non sono validi e non è possibile esprimere un giudizio circa lo stato delle mutazioni di questa regione bersaglio. Il limite di copertura è indicato sotto il grafico in colore arancione chiaro. L'unità utilizzata per il calcolo della copertura è "Read corrette per errori per regione target".

Esempio:

Positive Control

	Limits	Result	
Depth of coverage	≥ 1.0 UID families / GE	0.8 UID families / GE (minimum)	✗
Quantification	$500 \text{ GE} \leq x \text{ GE} \leq 1500 \text{ GE}$	808 GE	✓
Spike-in detection	≥ 10.0 MM	42.8 MM (average)	✓

La tabella **Positive Control** (Controllo positivo) indica i limiti che il controllo positivo dell'analisi deve raggiungere affinché la corsa di Plasma-SeqSensei™ sia considerata valida. Un segno di spunta verde (✓) indica un risultato valido, mentre una croce rossa (✗) indica un risultato non valido. Per questa sezione, i seguenti valori del controllo e del campione devono essere all'interno degli intervalli validi:

- La profondità della copertura di sequenziamento deve essere di almeno 1 famiglia UMI per GE per il controllo positivo per tutte le gli ampliconi incluse.
- La quantificazione (in GE) del controllo positivo deve essere all'interno degli intervalli di accettabilità indicati.
- È necessario raggiungere un limite di rilevamento di almeno 10 MM per mutazione inclusa nel controllo positivo.

Esempio A:

No Template Control

NTC ID	Avg. UID Threshold	Avg. UID Result	
NTCplatea	< 15.0	0.03	✓

Esempio B:

No Template Control

NTC ID	Avg. UID Threshold	Avg. UID Result	
NTCplatea	< 15.0	3577.34	✗

La sezione **No Template Control** (Controllo “no template”) indica se si è verificata una possibile contaminazione del controllo “no template”. Un segno di spunta verde (✓) indica un risultato valido, mentre una croce rossa (✗) indica un risultato non valido. Se il risultato UMI medio è superiore a 15, i campioni potrebbero essere contaminati e la corsa sarà quindi considerata non valida.

Esempio:

Read Overview

Category	Result
Reads imported from sequencer	18,611,038
Reads with sufficient quality and length for error correction	17,612,879
Rate of reads usable for error correction	94.64%
Reads assigned to UID families with sufficient size	17,136,078
Rate of reads assigned to UID families with sufficient size	97.29%
Error corrected reads	812,656


FASTQ reads are imported from the sequencing device. Only reads passing certain quality and length thresholds will be further analysed by the Plasma-SeqSensei™ IVD software. Reads are grouped according to their bar-code sequence (UID / UMI) and only reads assigned to UID families with sufficient size are used for error correction. The error corrected reads are the starting point for alignment and mutation calling.

È possibile trovare ulteriori informazioni sulla corsa di sequenziamento e sull'analisi nella sezione **Sample Metrics** (Metriche del campione).

La sezione **Read Overview** (Panoramica delle letture) fornisce informazioni sui numeri e sulle percentuali dei diversi tipi di Read durante l'analisi dei dati.

Esempio:

Sequencing Quality

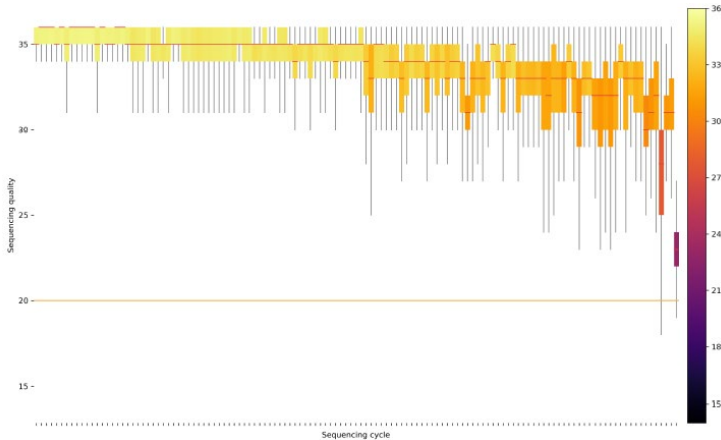

Distribution of QPhred quality values in error corrected reads per sequencing cycle. The orange line in the plot indicates the QPhred quality threshold which is required for mutation calling. A subset of 10,000 reads is used per FASTQ file of the sample to generate this plot.

La sezione **Sequencing Quality** (Qualità di sequenziamento) mostra un grafico con una media di tutti i valori di qualità QPhred per un sottoinsieme di Read del campione selezionato secondo il numero del ciclo di

sequenziamento. I punteggi QPhred superiori a 20 (linea arancione) sono accettabili.

Esempio:

Analysis Software and Database Information

Analysed by Plasma-SeqSense™ IVD Software (v1.3.1)
Assay configuration: BreastCancer_IVD1 v1.0.1
Sequencing result based on:

- Genome Reference Consortium Human Build 37 (GRCh37)
- COSMIC Database v92 (<https://cancer.sanger.ac.uk/cosmic>)
- dbSNP Database Build 151 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp>)
- ClinVar Database 2020-12-08 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar>)
- Ensembl Database (<https://www.ensembl.org>)


L'ultima sezione del referto, **Analysis Software and Database Information** (Informazioni sul software di analisi e il database) include le informazioni sul software di analisi e sul database utilizzati per l'analisi di questo campione.

Date, Signature

Alla fine del referto è presente un **campo per la firma**.

8 Ricerca ed eliminazione dei guasti

Se si verificano problemi durante l'uso di Plasma-SeqSensei™ Software, fare riferimento alla tabella seguente o contattare il rappresentante Sysmex autorizzato di zona per ulteriori informazioni.

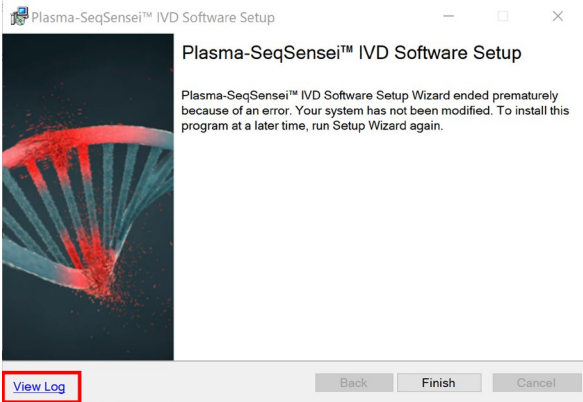Problema	Soluzione
<p>Il software non viene installato correttamente.</p>	<p>Accertarsi di aver seguito esattamente le istruzioni fornite nella sezione 5.1.1 del presente manuale per l'installazione del software. Ciò include in particolare l'ubicazione della cartella scaricata (localmente) e la decompressione del file .zip prima dell'installazione. Spacchettare solamente la prima cartella, <u>non</u> spacchettare le sottocartelle.</p> <p>Se l'installazione verrà eseguita in un secondo momento, assicurarsi di eliminare la cartella C:\Users\Public\SysmexInostics\Ivd, se già esistente. Se non è ancora possibile installare correttamente il software, contattare il servizio assistenza Sysmex e fornire una copia del file di registro dell'installazione memorizzato qui (riquadro rosso):</p> 
<p>Non è possibile visualizzare l'intera finestra e non è possibile chiuderla.</p>	<p>Le impostazioni del fattore di scala dello schermo del computer devono essere impostate a un valore pari o inferiore a 125 % per poter visualizzare l'intera finestra del software.</p>
<p>Il pulsante di "start analysis" (avvio analisi) non è presente.</p>	<p>Si prega di impostare la scala dello schermo a un valore pari o inferiore al 125 % e di riavviare il Plasma-SeqSensei™ Software.</p>

La chiave di licenza non viene accettata durante l'installazione del software.	Verificare che non siano stati aggiunti spazi aggiuntivi nel codice della licenza o nel nome del cliente e controllare che sia stato scaricato il software corretto (RUO o IVD) oppure contattare il servizio assistenza Sysmex.
--	--

Modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa)

Il numero articolo o il numero di lotto non viene accettato.	Accertarsi di aver utilizzato l'intero numero, che comprende le lettere maiuscole ZR + sei numeri per il numero articolo o D + cinque numeri per il numero di lotto. È necessario inserire solo il numero articolo del kit IVD Plasma-SeqSensei™ Assay-Specific. <u>Non</u> includere il numero articolo del kit dell'Extension IVD.
Non sono presenti saggi selezionabili.	Si prega di eseguire una seconda installazione dopo aver cancellato la cartella: C:\Users\Public\Systemex\Inostics\ivd. Assicurarsi che sia stata decompressa solo la cartella scaricata che si trova nella cartella download e che tutte le sottocartelle siano ancora zippate. Non decomprimere le sottocartelle.
Nella pagina "Plate Summary" (Riepilogo della piastra) manca un campione.	Accertarsi di aver inserito il numero corretto di campioni con i rispettivi nomi dei campioni e le concentrazioni di DNA nel modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa).
Il nome del campione non è stato accettato.	Il nome del campione deve essere: <ol style="list-style-type: none"> 1. univoco 2. non più lungo di 16 caratteri 3. composto da soli caratteri alfanumerici.
La quantità di DNA non è stata accettata.	La quantità di DNA deve essere all'interno degli intervalli specifici per l'IVD Kit utilizzato; inoltre, come separatore decimale è necessario utilizzare un punto (.).
La scheda campione non è stata accettata dal dispositivo di sequenziamento NextSeq™.	Se nel dispositivo di sequenziamento si utilizza una versione obsoleta (< v2.4.0) del Local Run Manager, la scheda campione attuale potrebbe non essere compatibile. Provare a utilizzare la seconda versione della scheda campione disponibile nella pagina "File Export" (Esportazione file) del modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa) o contattare il servizio assistenza Sysmex.

Modulo "Data Analysis" (Analisi dei dati)

L'ID Flowcell non viene accettato.	Utilizzare l'intero ID Flowcell come indicato sul Flowcell, nel dispositivo di sequenziamento o in Sequencing Analysis Viewer.
------------------------------------	--

8 Ricerca ed eliminazione dei guasti

<p>Non si riesce ad avviare l'analisi perché sono stati trovati file aggiuntivi.</p>	<p>Assicurarsi che il file FASTQ denominato "Undetermined.fastq.gz" non sia incluso nella cartella dell'analisi.</p>
<p>Alcuni file sono mancanti ed è impossibile avviare l'analisi.</p>	<p>Si prega di controllare di avere a disposizione nella cartella dell'analisi il numero corretto di file FASTQ.</p> <p>Durante la demultiplazione vengono generati alcuni file FASTQ. A seconda della pipeline di demultiplazione, il numero di file FASTQ per campione può variare. Se si sta utilizzando bcl2fastq per la demultiplazione, sono solitamente presenti 5 file FASTQ per campione (un file per pozzetto). In alternativa, possono essere generati 20 file FASTQ per campione (5 pozzetti per campione, 4 corsie per pozzetto). Ciò si verifica quando si utilizza il modulo "GenerateFASTQ" del Local Run Manager sul proprio dispositivo NextSeq™.</p> <p>Quando si sequenziano due piastre Plasma-SeqSensei™ nella stessa corsa applicando l'LRM, vengono generati 80 file FASTQ per campione (5 pozzetti per campione, 4 corsie per pozzetto, 4 indici piastra).</p> <p>Per riepilogare, nella cartella FASTQ di input devono essere presenti 5, 20 o 80 file FASTQ per singolo campione. Inoltre, il Positive Control (PC) e il No Template Control (NTC) ricevono 1, 4 o 16 file FASTQ che si trovano anch'essi nella cartella dell'analisi.</p>
<p>L'analisi impiega troppo tempo.</p>	<p>In genere l'analisi richiede meno di 6 ore. Qualora l'analisi richieda più tempo, potrebbero essersi verificati diversi problemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il dispositivo non ha abbastanza memoria disponibile. • I file FASTQ sono di dimensioni molto grandi a causa dell'utilizzo di un kit di sequenziamento non appropriato, ad es. basso numero di campioni/quantità di DNA con un High Output Kit. • Plasma-SeqSensei™ IVD Software non è installato sullo stesso dispositivo dove sono memorizzati i dati. Quando i file sono memorizzati su un'unità di rete, l'accesso può essere limitato/lento qualora l'unità di rete sia molto occupata con altri processi. • Bassa qualità delle Read. <p>In tal caso, interrompere la corsa, risolvere il problema (ad es. la posizione di installazione del software) e riavviare la corsa o attendere il termine dell'analisi. Se l'analisi continua a non arrivare al termine, contattare il servizio assistenza.</p>
<p>Dove sono le metriche di qualità di sequenziamento?</p>	<p>Le metriche vengono visualizzate al termine di ogni corsa sul dispositivo di sequenziamento. Inoltre, possono essere visualizzate nel software Illumina Sequencing Analysis Viewer (SAV) durante il caricamento della corsa di sequenziamento.</p>

<p>Perché durante l'uso dell'LRM su NextSeq™ sono visibili 4 file .fastq.gz per pozzetto?</p>	<p>Quando si utilizza il Local Run Manager (LRM) durante la fase di sequenziamento sul proprio dispositivo NextSeq™ viene creato un file per corsia di ciascun pozzetto, ossia 4 file in totale. Plasma-SeqSensei™ IVD Software concatenerà automaticamente i file per eseguire le ulteriori analisi.</p> <p>Quando si utilizza il Plasma-SeqSensei™ Extension IVD Kit e si sequenziano due piastre nella stessa corsa di sequenziamento, per ciascun pozzetto vengono creati 16 file.</p>
<p>È impossibile selezionare i file FASTQ quando si naviga in Plasma-SeqSensei™ IVD Software.</p>	<p>I file FASTQ non sono visibili nella finestra di selezione. Deve essere selezionata la cartella che contiene i file.</p>
<p>Non trovo la scheda campione della mia corsa.</p>	<p>Provare a usare la funzione di ricerca del proprio computer, oppure preparare una nuova scheda campione ripetendo la procedura nel modulo "Run Planning" (Pianificazione della corsa). Accertarsi di inserire i valori corretti per nomi, concentrazioni e layout della piastra.</p>

Modulo "Reporting" (Refertazione)

<p>È impossibile esportare i referti quando si fa clic sulle icone o sui pulsanti.</p>	<p>Questo comportamento indica un problema con l'analisi, che probabilmente è stata interrotta prematuramente. È necessario ripetere l'analisi. Assicurarsi che il proprio ambiente operativo soddisfi tutti i requisiti elencati nel ► capitolo 2.2 <i>Specifiche di sistema per l'esecuzione del software</i>, pagina 3/61.</p>
<p>Alcuni ampliconi non sono validi; cosa comporta ciò per il referto?</p>	<p>Se oltre il 10 % di tutte le regioni target non raggiunge la copertura del campione target, l'intera analisi del campione sarà considerata non valida. Se meno del 10 % di tutte le regioni target non raggiunge la copertura del campione target, saranno considerati non validi solo gli ampliconi interessati, mentre il resto delle regioni sarà considerato valido.</p> <p>Tutte le mutazioni rilevate (sia quelle valide che quelle non valide) sono riportate nei file .vcf.</p>

9 Glossario e terminologia

Termini	Definizione
cfDNA	DNA libero circolante
ClinVar	Variazione clinica
COSMIC	Catalogo di mutazioni somatiche nel cancro
CPU	Unità centrale di elaborazione
ctDNA	DNA tumorale circolante
DNA	Acido desossiribonucleico
GB	Gigabyte
GE	Equivalenti genomici
ID	Identificatore
IFU	Istruzioni per l'uso
IVD	Diagnostica in vitro
LRM	Local Run Manager (Gestione locale della corsa)
MAF	Frazione di allele mutante
MM	Molecole mutanti
NGS	Sequenziamento in parallelo
NTC	No Template Control
PC	Positive Control
PCR	Reazione a catena della polimerasi
PF	Passing filter (Superamento filtro di controllo)
RUO	Research Use Only (Solo per uso a scopo di ricerca)
SNP	Polimorfismo a singolo nucleotide
SNV	Variante a singolo nucleotide
UMI	Identificatore univoco

10 Cronologia delle revisioni

Versione documento	Data	Descrizione delle modifiche	Sezione
R4	Aprile 2024	<p>Aggiunta e informazioni circa il servizio di aggiornamento e il nuovo pulsante nella finestra del software</p> <p>Informazioni circa il nuovo passaggio nel modulo di analisi</p> <p>Ulteriori informazioni nel referto per sezione</p> <ul style="list-style-type: none"> Validità della corsa e del campione Stato delle mutazioni del campione Mutazioni somatiche rilevate <p>Potenziali mutazioni germinali</p> <p>Eliminazione della sezione delle Mutazioni non valide rilevate nel referto</p> <p>Eliminazione delle informazioni sulle mutazioni per i campioni con contenuto di DNA superiore agli intervalli consentiti</p> <p>Aggiornamento della tabella sulla ricerca ed eliminazione dei guasti</p>	<p>3.2.1 5.2</p> <p>6.2, passaggio 10</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>8</p>
R3	Dicembre 2023	<p>Aggiunta di una nota circa la necessità di una connessione Internet attiva per informazioni ed elaborazione degli aggiornamenti automatici</p> <p>Aggiornamento della tabella sulla ricerca ed eliminazione dei guasti</p>	<p>3.2</p> <p>8</p>
R2	Novembre 2022	<p>Informazioni sugli aggiornamenti automatici</p> <p>Aggiornamento dell'indirizzo della pagina web per il download</p> <p>Aggiunta di icone</p> <p>Aggiornamento dell'interfaccia utente</p> <p>Cambio dell'ordine durante i primi passaggi del "Run Planning" (Pianificazione della corsa)</p> <p>Aggiornamento degli screenshot e dell'ordine di comparsa per mutazioni somatiche valide, potenziali mutazioni germinali e mutazioni non valide nel referto</p>	<p>3.2.1</p> <p>5.1</p> <p>5.2</p> <p>5.3</p> <p>6.1, passaggio 2</p> <p>7</p>

10 Cronologia delle revisioni

Versione documento	Data	Descrizione delle modifiche	Sezione
		Aggiornamento della tabella sulla ricerca ed eliminazione dei guasti	8
		Aggiunta della tabella "Glossario e terminologia"	9
		Aggiunta della tabella "Cronologia delle revisioni"	10
R1	Luglio 2022	Versione iniziale	N/D

11 Appendice A

General Terms and Conditions

for Software Licenses of Sysmex Inostics GmbH

1. Subject matter

Sysmex Inostics GmbH, Falkenried 88, 20251 Hamburg, Germany (hereinafter referred to as "SIG") grants the customer a non-exclusive, non-transferable, temporary license to use the following software:

- Plasma-SeqSensei™ IVD Software for analysis of NGS data ("SIG Software")

Title, ownership rights and intellectual property rights in the SIG Software shall not pass to the customer. The license is granted in connection with the purchase of Plasma-SeqSensei™ IVD Kits for the duration of the use of the Plasma-SeqSensei™ IVD Kits.

2. Delivery

The SIG Software will be delivered as part of the delivery of the Plasma-SeqSensei™ IVD Kits. The SIG Software will be provided in its current version.

3. Licensed products from third party suppliers

If third party software products are also provided with the SIG Software that are not open-source software, these may only be used in conjunction with the SIG Software. SIG will draw the customer's attention to any special licensing conditions in an appropriate manner.

4. Prohibition of copying

The SIG software as well as the documentation must not be copied by the customer in whole or in part, with the exception of the production of a machine-readable copy of the SIG software for backup or archiving purposes. Any copy made by the customer for these purposes must be clearly and legibly marked with a complete reference to confidentiality, title, ownership rights and the intellectual property rights of SIG.

5. Prohibition of modification

The customer is neither allowed to make any changes to the SIG software himself nor to allow any third party to make any changes.

6. Prohibition of transfer

The transfer of rights and obligations arising from the license agreement to third parties, even after termination of the agreement, is not permitted. It is not permitted to pass on the license key.

7. Unauthorized use

The customer undertakes to ensure that his employees or other persons subject to his instructions who have access to the SIG software comply with all duties of protection and care arising from this agreement. Furthermore, the customer undertakes to ensure that no one gains access to the SIG Software for the purpose of deriving the source codes. If the customer becomes aware that the SIG Software is being used by one of the aforementioned persons in contravention of the existing obligations to protect and exercise due care, he will immediately do everything in his power to prevent such use in contravention of the contract and notify SIG in writing of the use in contravention of the contract.

8. Claim for damages

SIG is entitled to the industrial property rights and copyrights to the SIG Software. The customer can be held liable by SIG for any infringement of such property rights for which he is responsible.

9. Warranty

9.1 For the quality of the SIG Software, only the description of the SIG Software provided by the licensor prior to the conclusion of the contract or agreed in a separate document (e.g. in the documentation) shall be binding. Within the scope of the maintenance obligation, the licensor is not obliged to adapt the software to changed conditions of use and technical and functional developments, such as changes in the IT environment.

9.2 The licensor does not provide any warranty for errors in the software,

- which have been caused by application errors on the part of the customer and which could have been avoided if the documentation had been consulted carefully; this shall also apply in the event of non-existent or insufficient backup measures which would have prevented data loss;
- due to virus attack or other external influences for which the licensor is not responsible, such as fire, accidents, power failure, etc.;
- which are based on the fact that the SIG Software was used in an operating environment other than that approved by the licensor, or which are due to faults in the hardware, the operating system or the software of other manufacturers;
- which are based on the fact that the software has been modified by the customer or third parties without authorisation.

9.3 The customer is obliged to notify the licensor of defects in the SIG Software immediately after their discovery. In the case of material defects, this shall be done by describing the time of occurrence of the defects and the more detailed circumstances. If the licensor carries out a fault analysis at the customer's request and it turns out that there is no defect which the licensor is obliged to rectify, the licensor may invoice the customer for the expenditure incurred on the basis of the licensor's hourly rates valid at the time.

Defects in the software shall be remedied by the licensor within a reasonable period of time (subsequent performance). This shall be done, at the licensor's discretion, by eliminating the defect by means of an update/patch/bugfix/upgrade or by delivering defect-free software or by demonstrating a workaround, the latter to the extent that this is reasonable for the customer, taking into account the effects of the defect and the circumstances of the demonstrated workaround.

10. Liability

10.1 The licensor shall be liable in accordance with the statutory provisions for damages for bodily injury and personal injury, for damages based on the Product Liability Act, for damages caused by fraudulent conduct or intent on the part of the licensor, and for damages caused by gross negligence on the part of the legal representatives or executive employees of the licensor.

10.2 Notwithstanding any liability for damages according to section 10.1, the licensor shall be liable for damages limited to the amount of the foreseeable damage typical for the contract at the time of the conclusion of the contract for damages resulting from a simple negligent breach of essential contractual obligations as well as for damages caused by vicarious agents of the licensor. Material obligations are obligations the fulfilment of which is essential for the proper performance of the contract and compliance with which the licensee may regularly rely on. The contract-typical, foreseeable damage arising from breaches of duty by the licensor shall correspond to the amount of the remuneration paid by the customer in the contract year of the damaging event, up to a maximum of EUR 50,000. If the maximum liability amount is not reached in one contract year, the maximum liability amount for the next contract year shall not be increased.

10.3 Any further liability on the part of the licensor is excluded, subject to any expressly deviating provisions in these General Terms and Conditions. In particular, the licensor shall not be liable for initial defects unless the conditions of Clauses 10.1 or 10.2 are met. The licensor shall not be liable for damages incurred by the Licensee due to failure to back up data.

10.4 Contributory negligence on the part of the customer shall be taken into account.

10.5 The above limitations of liability shall also apply to the personal liability of the licensor's employees, representatives and/or bodies. They also apply to the liability of the licensor with regard to the reimbursement of futile expenses or indemnification obligations.

11. Rights of third parties

If claims are asserted against the customer by third parties due to alleged infringement of a patent, copyright, or other industrial property right to which the third party is entitled in respect of the SIG Software, SIG will indemnify the customer against claims by third parties, provided that the customer informs SIG immediately in writing of the alleged infringement of industrial property rights and supports SIG in the conduct of any legal action.

In the event of such a claim against the customer by a third party, SIG is entitled, at its discretion, either to procure for the customer a corresponding license from the third party, to modify the SIG software or to supply the customer with equivalent other software.

SIG shall not be liable for infringements of property rights resulting from the customer modifying the licensed software or modifying it according to his own requirements, or from the SIG Software being used or sold in conjunction with other software, hardware or consumables not supplied by SIG. This subject matter liability is the entire liability of SIG for infringement of any patent, trademark, copyright, or other intangible property right.

12. Software updates

Updates to the SIG Software will be provided to the customer free of charge.

13. Payment

The license fee is discharged with the purchase of the Plasma-SeqSensei™ IVD Kits. No additional fee will be charged.

14. Contract period

The granted use of the SIG Software shall be valid for the agreed contract period (see clause 1).

The contract may be terminated in writing by either party without notice for good cause. Good cause exists, in particular, if the customer infringes the licensor's rights of use by using the software beyond what is permitted under these General Terms and Conditions and does not remedy the infringement within a reasonable period of time following a warning by the licensor. The licensor reserves the right to assert further claims for damages.

15. Data protection

Insofar as personal data is processed, the licensor shall comply with the statutory provisions on data protection. Details shall be set forth in a Data Processing Agreement to be concluded separately.

16. General provisions

These General Terms and Conditions shall be governed by the laws of Germany. Exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from this contract shall be Hamburg.

Should one or more of the provisions of this contract be or become invalid, this shall not affect the validity of the rest of the contract.

No verbal agreements have been made. Amendments and supplements to this contract must be made in writing.







Aprile 2024
PSSSWIFU.R4

Systemx Inostics GmbH
Falkenried 88
20251 Hamburg, Germania
www.systemx-inostics.com

© 2024 Systemx Inostics
Tutti i diritti riservati.

